


INFORME DE REGISTRO

Medtronic CareLink™ Personal

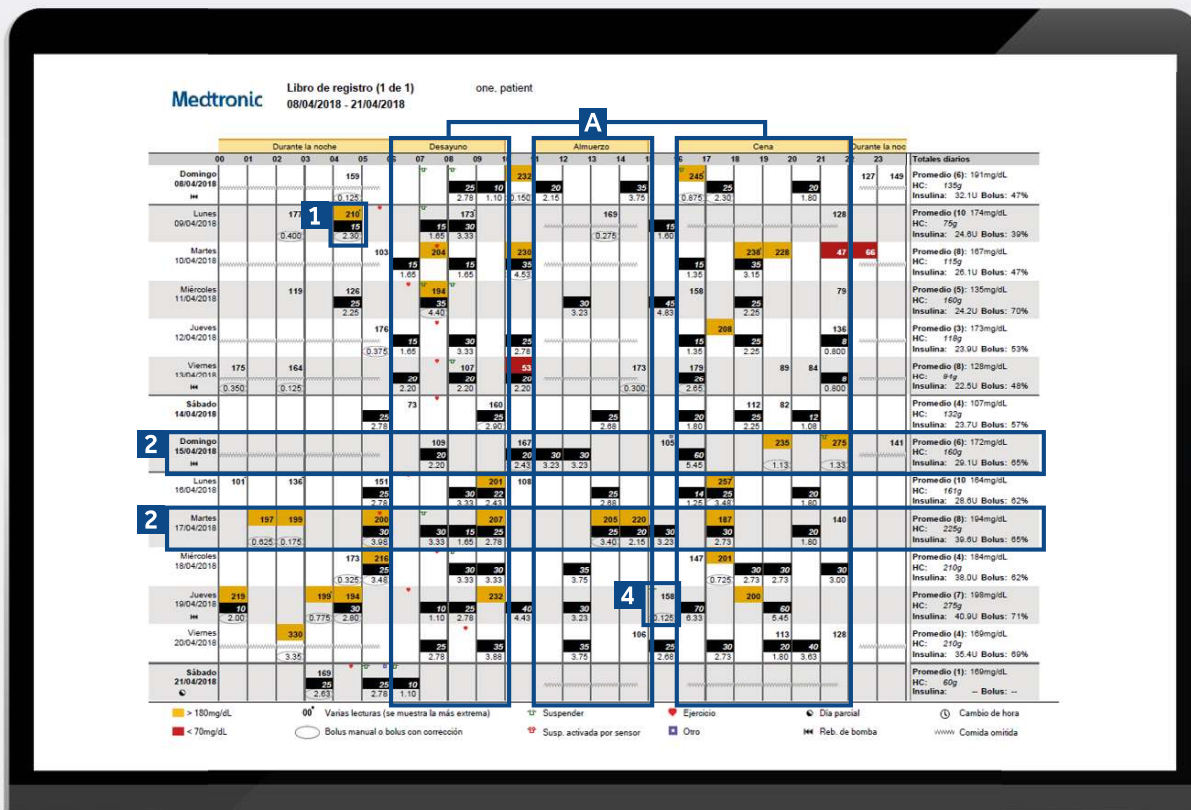

Información representativa de un paciente.

- 1 Cada bolo señalado se corresponde con la fecha y hora en las que fue administrado y contiene información de la glucosa (rojo si es baja, sin color si está en rango y naranja si está por encima del rango), carbohidratos registrados (en negro) e insulina administrada.
- 2 Estos ejemplos permiten identificar incrementos o descensos repentinos en la ingesta de carbohidratos, para ayudarte a identificar cualquier patrón.
- 3 Aquí se indica si en algún momento dentro del periodo de comidas no se ha administrado ningún bolo. El informe lo considera como una comida no realizada y pone una línea en zigzag.
- 4 Muestra un ejemplo de un bolo sin ingesta de carbohidratos. Esto podría ser un bolo de corrección o un bolo manual.

NOTAS