

GUÍA PASO A PASO SOFTWARE DE CARELINK™ PERSONAL




Medtronic
Further. Together™

1

REGISTRO


Entra en Carelink™ Personal a través del siguiente enlace: <https://carelink.minimed.eu> y seguidamente haz clic en **"CREAR UNA CUENTA"**, donde podrás crear un usuario y contraseña mediante la introducción de tu información personal en el formulario de inscripción que aparecerá en la pantalla.

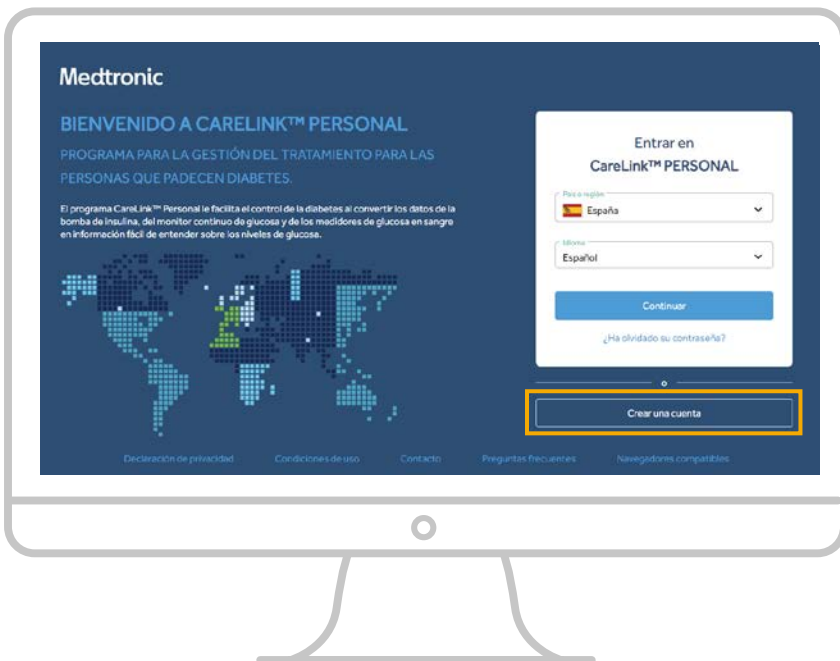


2

INSTALAR APLICACIÓN DE CARGA

Una vez hayas creado tu usuario, así como la verificación de este, podrás entrar en tu perfil a través de la página principal <https://carelink.minimed.eu> y una vez dentro debes hacer clic en la pestaña que pone **“CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN DE CARGA”**.

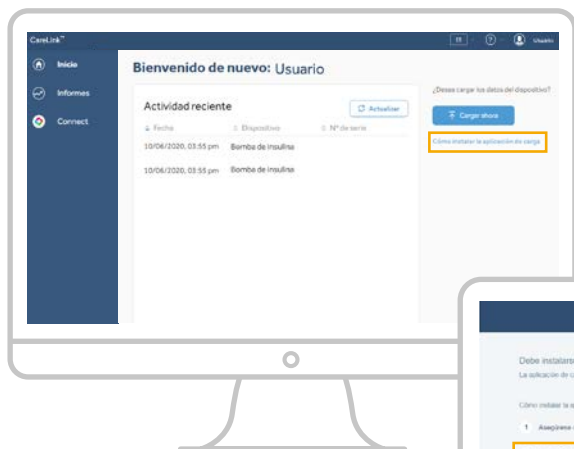


Cuando haya sido descargada la aplicación debes seguir las instrucciones de instalación para poder llevar a cabo la ejecución de este.

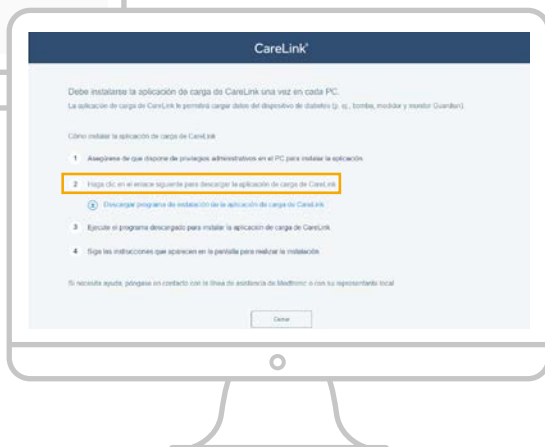

3

CARGA DE DISPOSITIVOS

Una vez haya sido ejecutado el programa deberás hacer clic en **"CARGAR DISPOSITIVO"** donde seguidamente se abrirá una pantalla preguntando si quieres descargar una bomba nueva o un glucómetro, selecciona la primera opción **"AÑADIR DISPOSITIVO NUEVO"** seguidamente selecciona el modelo de esta además de añadir el número de serie de tu bomba (Ej: NG0000000X) cuando así te lo solicite.

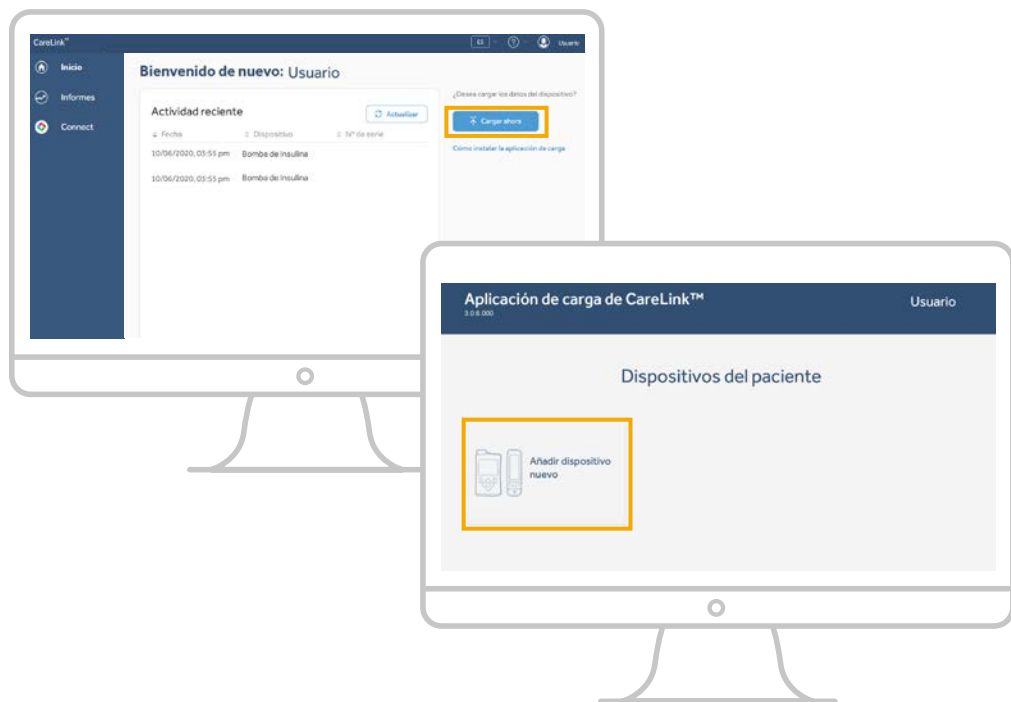

4

CONEXIÓN DE GLUCOMETRO


Conecta el glucómetro **Contour next link 2.4** en el ordenador a través del puerto USB y seleccione la opción "**CARGAR AHORA**", dicho proceso puede durar unos minutos, una vez completado dale a actualizar y ya puedes cerrar la ventana.



5

DESCARGA DE INFORMES

En la página principal de Carelink personal encontrarás una pestaña titulada Informes en la cual podrás descargar aquellos **"INFORMES"** que necesites donde además hay que añadir que es necesario seleccionar un periodo de tiempo, preferiblemente dos semanas. Finalmente es importante añadir que en la opción de **"PREFERENCIAS"** podrás llevar a cabo una modificación de gramos por raciones en unidades de 10, si así lo requieres, así como el ajuste de tus horarios de ingestas de alimentos.

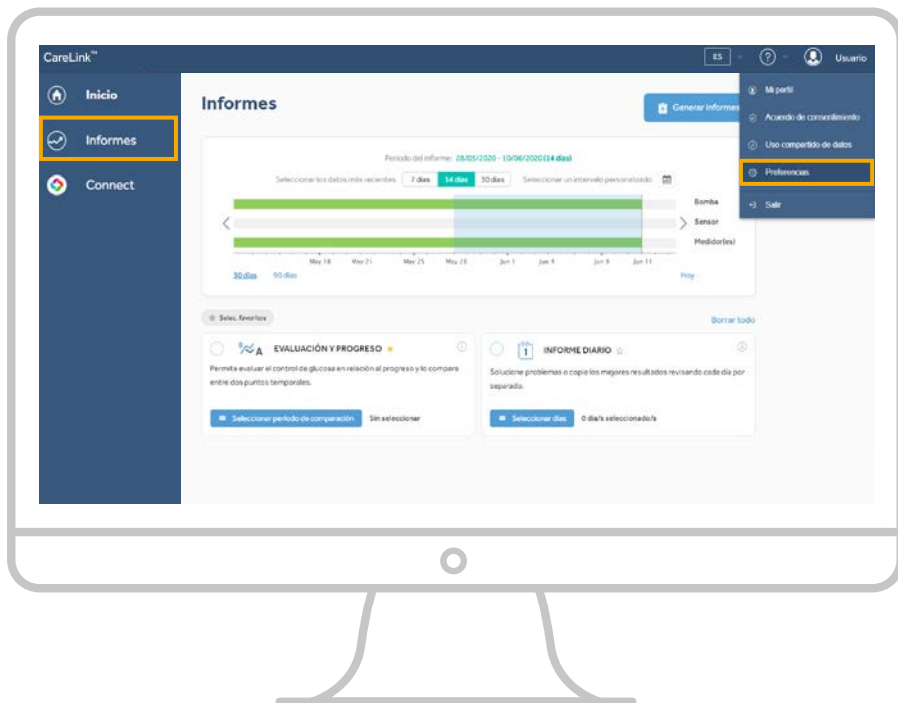



Inicio



Informes



Connect

Preferencias

Actualizar

Glucosa

Unidades de glucosa

mg/dL

mmol/L



Objetivo de glucosa

54



Baja (mg/dL)

70



Alta (mg/dL)

180



Límite superior (mg/dL)

250



Hidratos de carbono

Unidades de hidratos de carbono

gramos

ENCONES



Objetivo (hidratos de carbono)

15.0



gramos equivalentes a 1 ración

Formato hora

12h

24h

Datos del informe

¿TIENES MÁS PREGUNTAS?

Ponte en contacto con nuestro **Servicio Técnico** disponible las 24 horas del día llamando al **900 120 330**.

Medtronic

Medtronic Ibérica S.A.

Oficina Madrid
Calle María de Portugal, 11
28050, Madrid
Tlf. (+34) 91 625 04 00
Fax. (+34) 91 650 74 10

Oficina Barcelona
World Trade Center Almeda Park
Pça. De la Pau s/n Edificio 7, planta 3ª
08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona
Tlf. (+34) 93 475 86 10
Fax. (+34) 93 477 10 17

UC201912550 ES ©Medtronic 2020.
All rights reserved. Printed in Spain.

medtronic.es
medtronic-diabetes.es