

GUÍA DE DESCARGA DE DATOS

Nuevo Sistema de descarga de datos CareLink™ Personal

El primer paso para comprender mejor tu diabetes



1 Clica "Cargar ahora" y espera a que aparezca la pantalla del Uploader.



2 Clica sobre "Añadir dispositivo" si es tu primera descarga.



3 Selecciona el tipo de dispositivo si es tu primera descarga.

DESCARGA EL GLUCÓMETRO



A. Selecciona la marca del glucómetro si únicamente quieres descargar datos del glucómetro.




B. Selecciona el modelo del glucómetro.



C. Clica en "Siguiente" para preparar tu dispositivo para la descarga.



D. Espera a que se complete la descarga.

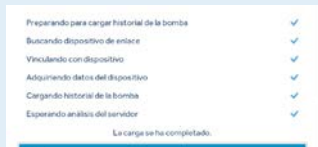

E. Descarga realizada con éxito.



4 Si no es tu primera descarga, selecciona el dispositivo que deseas descargar en la pantalla "Selecciona el tipo de dispositivo".

DESCARGA LA BOMBA DE INSULINA



A. Selecciona el tipo de bomba de insulina.



B. Conecta el dispositivo de conexión.



C. Selecciona el periodo de tiempo a descargar.



D. Sigue las instrucciones de la pantalla para preparar tu dispositivo para la descarga.



E. Introduce el número de serie de tu bomba de insulina (únicamente en la primera descarga)



F. Espera a que se complete la descarga.



G. Descarga realizada con éxito.

PARA GARANTIZAR EL ÉXITO, TEN TODO PREPARADO

Conecta tu USB de CareLink™ o tu glucómetro a tu ordenador.

- Coloca la bomba lo más cerca posible del USB de CareLink™ o del glucómetro conectado a tu ordenador.
- Mantén la conexión entre la bomba y el glucómetro.



Asegúrate de que tu bomba está lista para la descarga

Verifica que la bomba no tenga una de las siguientes pantallas.



- No hay basales temporales
- No hay alarmas
- No hay bolos activos
- No hay baja batería

Información de seguridad:

Software CareLink™ El software CareLink™ está diseñado para utilizarse como una herramienta complementaria para ayudar en el control de la diabetes, y NO para basarse únicamente en ella.

Medtronic Ibérica S.A.
Calle María de Portugal, nº 11
ES-28050 Madrid
Tel.: 900 120 330

IMPORTANTE: consulte el prospecto del envase para ver todas las instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
Productos sanitarios con marcado CE conformes al Real Decreto 1591/2009.

© 2020 Medtronic. Todos los derechos reservados. El logo de Medtronic y Further. Together son marca registrada de Medtronic. Todos los nombres son marca registrada de Medtronic.
UC202108604 ES

Medtronic