REJESTRACJA KONTA – PORADNIK

Nowe oprogramowanie CareLink™ Personal

Łatwe w użyciu Wygodne przesyłanie danych Przejrzyste analizy przyczynowo-skutkowe



ŁATWY PROCES REJESTRACJI KONTA

Medtronic	
<section-header><section-header><section-header><text></text></section-header></section-header></section-header>	Zaloguj dig do Censik niv PERSONAL Marine Angelanda Marine Na prespectival Marine Mari
1 Przejdź do strony www i wybierz kraj oraz pre Następnie wybierz "U	w.carelink.minimed.e ferowany język. twórz konto".

CareLink* E*A*REESTRONAVA 1. Unreny dotyczące zgody	Kraj i jezyk Kraj Ujezyk su wybierane automutycznie. Możescje zmienić.	Anuluj
	Polska v Jephi Jephipoleki v	

2 Potwierdź wybrany kraj oraz język.





4 Zostaniesz przeprowadzony przez proces dotyczący akceptacji warunków użytkowania, a Twoja zgoda będzie wymagana do założenia konta. Za każdym razem przejdź do dołu strony i dokonaj wyboru.

CareLin	k=	Dane do logowania		
etan Relestro		Nazwa użytkownika *		
2. Formularz		Nome haslo #	ø	
		Siła hasta: Co najmniej 8 znaków		
		Potwierdź nowe hasło *	8	
		E-mail *		
5	Wprowa w widoc Wskazów	dź odpowied znych polach wka: basło mi	nie inforn 1. usi mieć c	nacje o najmnje

8 znaków.



Medtronic

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

www.pompy-medtronic.pl

Całodobowa infolinia: tel.: +48 22 46 56 987 ©2019 Medtronic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Medtronic, logo Medtronic i Further, Together są znakami towarowymi firmy Medtronic. Wszystkie pozostałe marki są znakami towarowymi firmy Medtronic.

UC202009026 PO

PORADNIK INSTALACYJNY

Nowe oprogramowanie CareLink[™] Personal

Łatwe w użyciu Wygodne przesyłanie danych Przejrzyste analizy przyczynowo-skutkowe

USPRAWNIJ PRZEBIEG WIZYTY W PORADNI, WCZEŚNIEJ PRZESYŁAJĄC SWOJE DANE DO OPROGRAMOWANIA CARELINK™



Przesyłaj dane regularnie.



Analizuj raporty i poznaj zależności przyczynowo-skutkowe.



Współpracuj z lekarzem.

ZACZNIJ OD POBRANIA PLIKÓW INSTALACYJNYCH NOWEJ FUNKCJI PRZESYŁANIA

Wymagane jest jednorazowe pobranie na każdy komputer, który będzie wykorzystywany do pracy z CareLink™.

ZAINSTALUJ

POBRANY PLIK



Zaloguj się na www.carelink.minimed.eu i kliknij "Sposób instalacji funkcji przesyłania" LUB kliknij "?", a następnie "Sposób instalacji funkcji przesyłania".







OK

4 Upewnij się, że CareLink™ USB oraz glukometr nie są podłączone do komputera potwierdź klikając "OK", a następnie "Zakończ".



TERAZ MOŻESZ PRZESŁAĆ DANE

Jeśli jesteś gotów przesłać dane, wróć na stronę główną CareLink™ Personal.

Instrukcje dotyczące przesyłania danych znajdziesz w "CareLink™ Personal Poradnik Przesyłania Danych". Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Oprogramowanie CareLink™ jest przeznaczone do użycia jako narzędzie wspomagające w leczeniu cukrzycy, ale NIE powinno być wyłącznym narzędziem do podejmowania decyzji terapeutycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące instrukcji użytkowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i potencjalnych zdarzeń niepożądanych, zapoznaj się z instrukcją obsługi.