

PELKÄN SÄILIÖN VAIHTAMINEN

ALOITA TÄSTÄ

1



Pese kädet.

2 Valikko

Annostelun pysäytys

Ääniasetukset

Historia

Säiliö ja letku

Insuliiniasetukset

Paina -painiketta. Valitse **Säiliö ja letku**.

3 Säiliö ja letku

Uusi säiliö

Kan. täyttö

Valitse **Uusi säiliö**.


4 Uusi säiliö

1. Irrota infuusiosetti kehosta.

2. Poista säiliö pumpusta.

Palauta alkuas.

Irrota letku kanyylikotelosta. Älä irrota kanyylikoteloä kehosta.

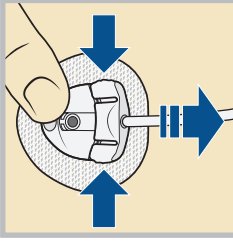


5 Uusi säiliö

1. Irrota infuusiosetti kehosta.

2. Poista säiliö pumpusta.

Palauta alkuas.

Poista käytetty säiliö pumpusta.

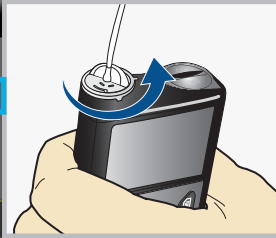



Irrota infuusiosetin letkuliitin käytetystä säiliöstä. Aseta letku puhtaalle pinnalle. Älä heitä sitä roskeen.

Hävitä käytetty säiliö laittamalla se asianmukaiseen jätteenastiaan paikallisten lakien mukaisesti.

6 Uusi säiliö

1. Irrota infuusiosetti kehosta.

2. Poista säiliö pumpusta.

Palauta alkuas.

Kun infuusiosetin letku on irrotettu kehosta ja säiliö on poistettu pumpusta, valitse **Palauta alkuas.**

Palautus alkuasentoon



Odota...

Uusi säiliö

1. Täytä säiliö.

2. Kytke letku säiliöön.

ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.

Seuraava


Jatka seuraavan sivun kohdasta "Täytä säiliö".

HUOMAUTUS: Pidempään käyttöön tarkoitettua Extended-infuusiosettiä voidaan käyttää enintään seitsemän vuorokautta. Säiliötä voidaan käyttää enintään kolme tai seitsemän vuorokautta; katso säiliön käyttöohjeet. Jotta insuliinia ei mene hukkaan, täytä säiliöön tarpeeksi insuliinia, jotta se riittää infuusiosetin seuraavaan vaihtoon asti.


Kun vaihdat infuusiosetin, vaihda kaikki sen osat (kanyylikotelo, letku ja säiliö).

PELKÄN SÄILIÖN VAIHTAMINEN


TÄYTÄ SÄILIÖ JA LIITÄ SE INFUUSIOSETIN LETKUUN

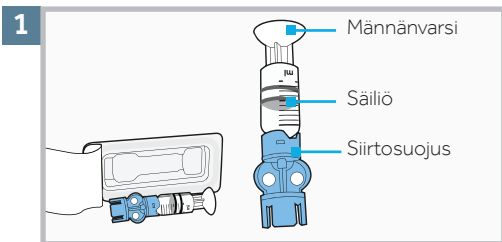


Poista pakkauksesta. Varmista, että insuliinipullo on huoneenlämpöinen, jotta ilmakuplia ei muodostu.

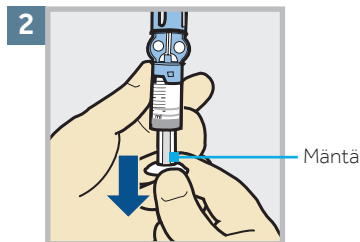


Vedä mäntä alas täytössä käytettävän insuliinimäärän kohdalle.

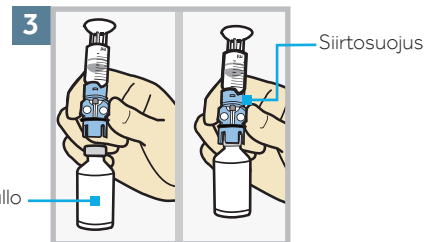


Pyyhi pullo alkoholilla. Aseta pullo pöydälle. Paina **sininen** siirtosuojaus napakasti kiinni pulloon.

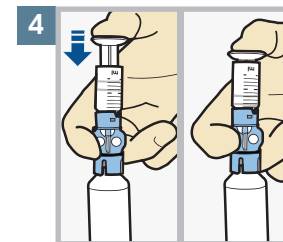


Paina mäntä pohjaan ja pidä sitä paikallaan.

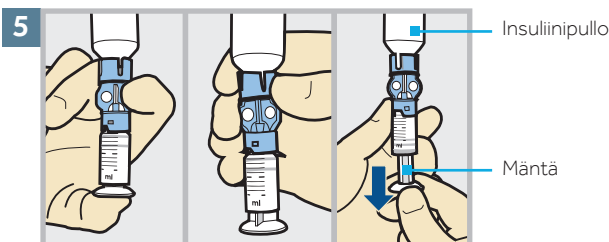

Pidä peukalo kiinni männässä ja käännä pullo ylösalaisin niin, että pullo tulee ylös. Vapauta peukalo ja täytä insuliinilla vetämällä mäntää alas.

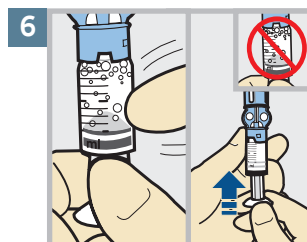


Siirrä ilmakuplat säiliön yläosaan napauttamalla säiliötä. Siirrä ilma pulloon painamalla mäntää ylös.

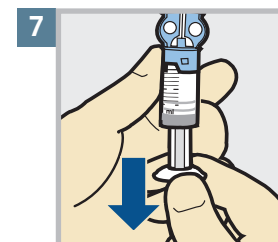

Vedä mäntä takaisin alas tarvittavan insuliinimäärän kohdalle.



VAROITUS Älä käytä säiliötä tai infuusiosettiä, jos nestettä pääsee säiliön yläpinnalle tai letkuliittimen sisään. Neste voi tukkia aukot väliaikaisesti. Tämä saattaa johtaa insuliinin liian vähäiseen tai liian runsaaseen annosteluun, joka voi aiheuttaa hyperglykemian tai hypoglykemian. Jos nestettä pääsee säiliön yläpinnalle tai letkuliittimen sisään, aloita alusta käyttämällä uutta säiliötä ja infuusiosettiä.

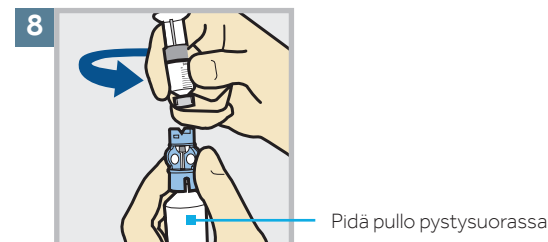


Jotta insuliinia ei pääse säiliön yläpinnalle, käännä pullo toisinpäin niin, että se on pystysuorassa. Pidä kiinni siirtosuojuksesta ja käännä säiliötä vastapäivään, kunnes säiliö irtoaa siirtosuojuksesta.


PELKÄN SÄILIÖN VAIHTAMINEN

LIITÄ SÄILIÖ INFUUSIOSETIN LETKUUN


Aseta nyt letkuliitin täytetyn säiliön päälle.

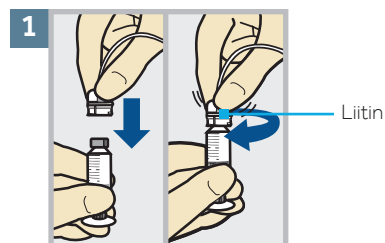

Paina letkuliitin varovasti säiliön päälle. Käännä myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu. Kuulet napsahduksen.

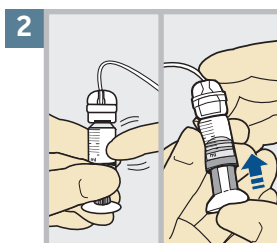


Jos näet ilmakuplia, siirrä ne säiliön yläosaan napauttamalla säiliötä. Siirrä ne letkuun painamalla mäntää hieman.

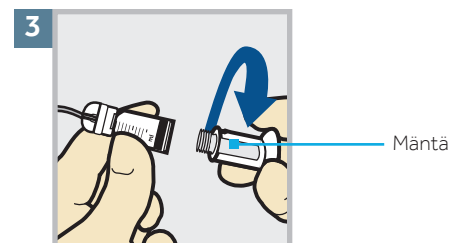

Löysennä ja irrota mäntä kiertämällä sitä vastapäivään.

TAUSTAVALO ON SAATTANUT SAMMUA.

Sytytä näytön valo uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.

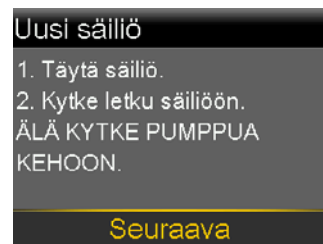


Avaa valikko painamalla -painiketta. Jos pumppu on lukittu, sinun on avattava pumpun lukitus -painikkeen painamisen jälkeen.



Valitse **Seuraava**.

ASETA SÄILIÖ PUMPPUUN


Aseta seuraavaksi täytetty säiliö pumpun säiliölokeroon.

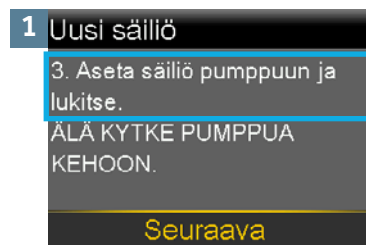

Aseta säiliö pumppuun.

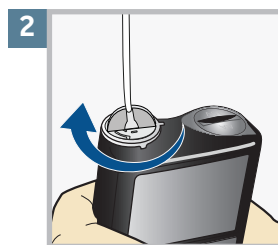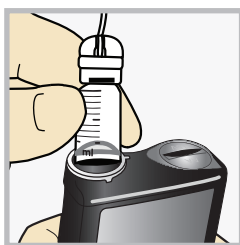

Käännä säiliötä myötäpäivään, kunnes tunnet sen lukkiutuvan paikalleen.

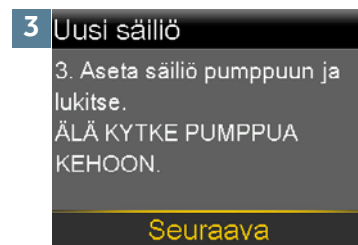

Valitse **Seuraava**.

PELKÄN SÄILIÖN VAIHTAMINEN

ASENNA SÄILIÖ JA TÄYTÄ LETKU

Asenna säiliö ja täytä letku noudattamalla seuraavia ohjeita.

1 Asenna säiliö

Paina Asenna, kunnes valmis. ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.

Asenna Seuraava



Valitse **Asenna** ja pidä  -painike painettuna.

2 Asenna säiliö

Valmis

ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.

Asenna **Seuraava**



Kun näet tämän näytön, valitse **Seuraava**.

3 Täytä letku

ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.

Paina Täytä, kunnes näet pisaroita, ja valitse Seuraava.

0.0 U

Täytä Seuraava



Valitse **Täytä** ja pidä  -painike painettuna, kunnes näet pisaroita letkun päässä. Vapauta sitten painike.

4 Täytä letku

ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.

Paina Täytä, kunnes näet pisaroita, ja valitse Seuraava.

2.4 U

Täytä **Seuraava**

Kun näet pisaroita, paina  -painiketta ja valitse **Seuraava**.

KIINNITÄ INFUUSIOSETTI TAKAISIN

Liitä infuusiosetin letku takaisin kehossa olevaan kanyylikoteloon noudattamalla seuraavia ohjeita.



VAROITUS ÄLÄ täytä kanyyliä. Valitse Valmis. Kun infuusiosetti kiinnitetään takaisin pelkän säiliön vaihdon jälkeen, kanyylin täyttäminen voi johtaa insuliinin liialliseen annosteluun, mikä voi aiheuttaa hypoglykemian.


1 Täytä kanyyli?

1. Aseta infuusiosetti kehoon.
2. Täytä kanyyli valitsemalla Täytä tai valitse Valmis, jos täyttöä ei tarvita.

Täytä **Valmis**

Kanyyliä ei tarvitse täyttää, koska et vaihtanut infuusiosettiä.

Paina  -painiketta ja valitse Valmis.

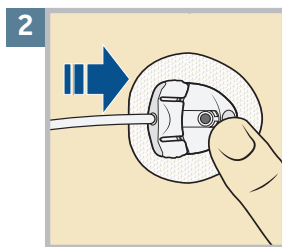

Pidä kanyylikoteloä varovasti paikallaan sormen avulla. Paina sitten infuusiokohdan liitintä suoraan kanyylikotelon sisään, kunnes kuulet napsahduksen.

Pyydä terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeita matalan verensokerin hoitoon osana insuliinihoitoasi.

Säiliön vaihto on nyt suoritettu loppuun.

Muista tarkistaa verensokeri 1–3 tunnin kuluttua säiliön vaihtamisesta.