


SÄILIÖN JA INFUUSIOSETIN VAIHTAMINEN

ALOITA TÄSTÄ

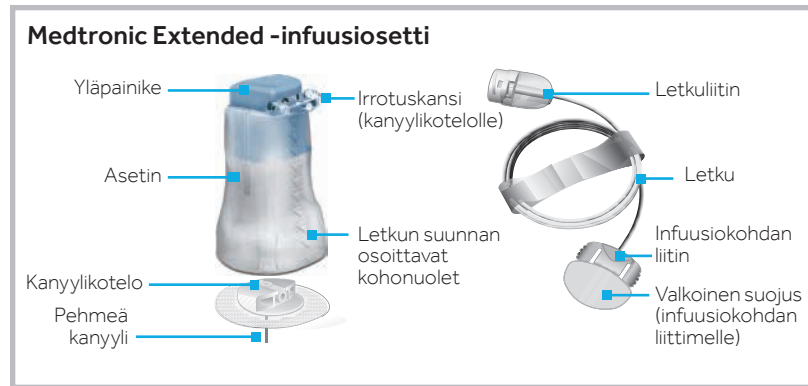

Pese kädet.



Valitse .





Valitse **Uusi säiliö**.




HUOMAUTUS: Pidempään käyttöön tarkoitettua Extended-infuusiosettiä voidaan käyttää enintään seitsemän vuorokautta. Säiliötä voidaan käyttää enintään kolme tai seitsemän vuorokautta; katso säiliön käyttöohjeet. Jotta insuliinia ei mene hukkaan, täytä säiliöön tarpeeksi insuliinia, jotta se riittää infuusiosetin seuraavaan vaihtoon asti.


Kun vaihdat infuusiosetin, vaihda kaikki sen osat (kanyylikotelo, letku ja säiliö).

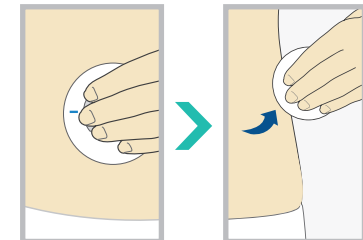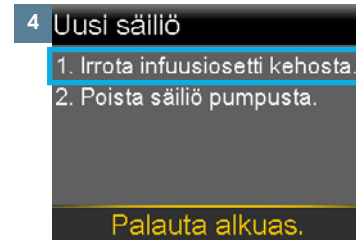


Irrota käyttämäsi infuusiosetti irrottamalla teippi ja vetämällä infuusiosettiä pois päin kehosta.

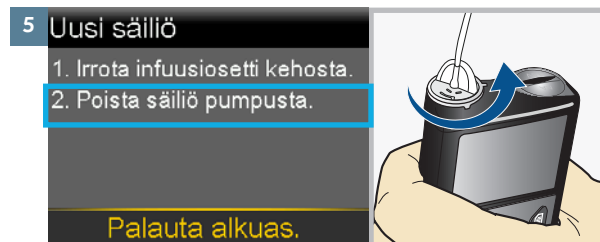

Poista käytetty säiliö pumpusta.

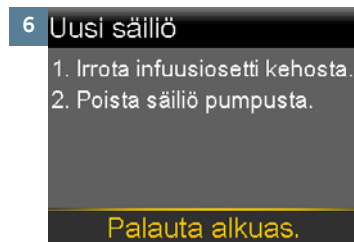

Kun infuusiosetti on irrotettu kehosta ja säiliö on poistettu pumpusta, valitse **Palauta alkuas**.

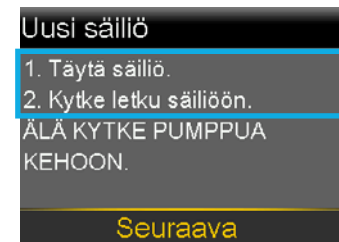


Jatka seuraavan sivun kohdasta "Täytä säiliö".


SÄILIÖN JA INFUUSIOSETIN VAIHTAMINEN

TÄYTÄ SÄILIÖ


Täytä seuraavaksi säiliö insuliinilla.

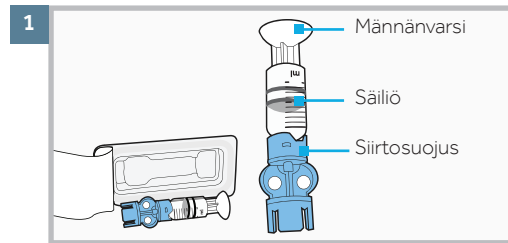


Poista pakkauksesta. Varmista, että insuliinipullo on huoneenlämpöinen, jotta ilmakuplia ei muodostu.

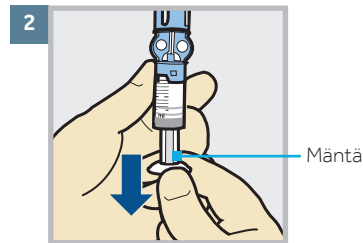


Vedä mäntä alas täytössä käytettävän insuliinimäärän kohdalle.

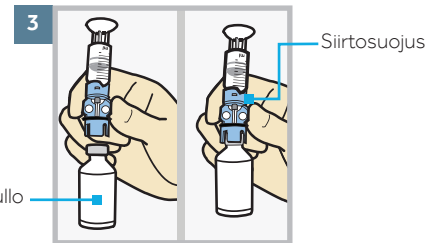


Pyyhi pullo alkoholilla. Aseta pullo pöydälle. Paina **sininen** siirtosuojaus napakasti kiinni pulloon.

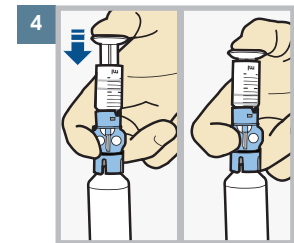


Paina mäntä pohjaan ja pidä sitä paikallaan.

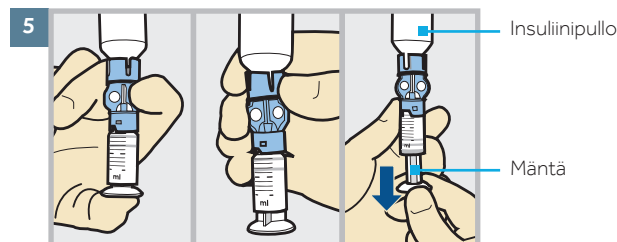

Pidä peukalo kiinni männässä ja käännä pullo ylösalaisin niin, että pullo tulee ylös. Vapauta peukalo ja täytä insuliinilla vetämällä mäntää alas.

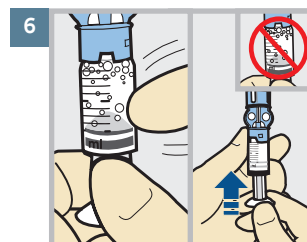

Siirrä ilmakuplat säiliön yläosaan napauttamalla säiliötä. Siirrä ilma pulloon painamalla mäntää ylös.

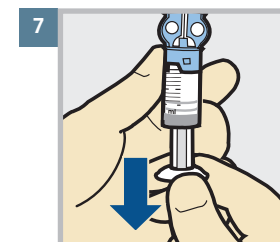


Vedä mäntä takaisin alas tarvittavan insuliinimäärän kohdalle.



VAROITUS Älä käytä säiliötä tai infuusiosettiä, jos nestettä pääsee säiliön yläpinnalle tai letkuliittimen sisään. Neste voi tukkia aukot väliaikaisesti. Tämä saattaa johtaa insuliinin liian vähäiseen tai liian runsaaseen annosteluun, joka voi aiheuttaa hyperglykemian tai hypoglykemian. Jos nestettä pääsee säiliön yläpinnalle tai letkuliittimen sisään, aloita alusta käyttämällä uutta säiliötä ja infuusiosettiä.

Pyydä terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeita matalan verensokerin hoitoon osana insuliinihoitoasi.

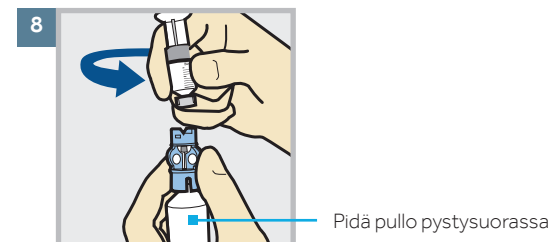



Jotta insuliinia ei pääse säiliön yläpinnalle, käännä pullo toisinpäin niin, että se on pystysuorassa. Pidä kiinni siirtosuojuksesta ja käännä säiliötä vastapäivään, kunnes säiliö irtoaa siirtosuojuksesta.


SÄILIÖN JA INFUUSIOSETIN VAIHTAMINEN


LIITÄ SÄILIÖ INFUUSIOSETIN LETKUUN

Aseta nyt letkuliitin täytetyn säiliön päälle.

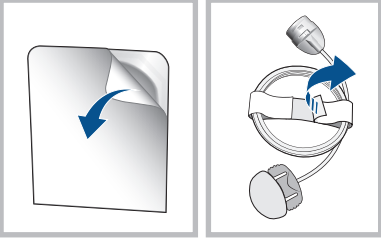- 

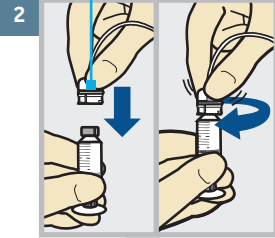Poista infuusiosetti pakkauksesta. Poista letkun yhdessä pitävä paperi ja suorista letku.
- 

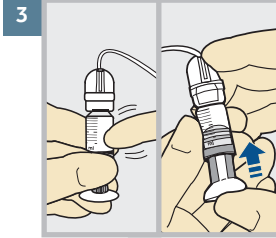Paina letkuliitin varovasti säiliön päälle. Käännä myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu. Kuulet napsahduksen.
- 

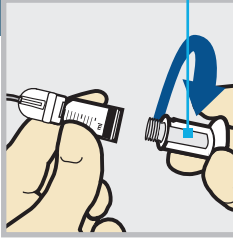Jos näet ilmakuplia, siirrä ne säiliön yläosaan napauttamalla säiliötä. Siirrä ne letkuun painamalla mäntää hieman.
- 


Löysennä ja irrota mäntä kiertämällä sitä vastapäivään.

Taustavalon on saattanut sammua.

Sytytä näytön valo uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.



Valitse .

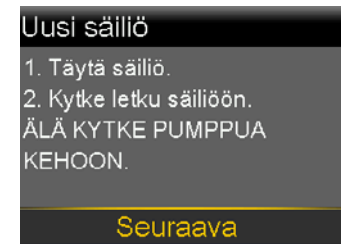


Valitse **Seuraava**.


ASETA SÄILIÖ PUMPPUUN

Aseta seuraavaksi täytetty säiliö pumpun säiliölokeroon.

- 

1 Uusi säiliö
3. Aseta säiliö pumppuun ja lukitse.
ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.
Seuraava

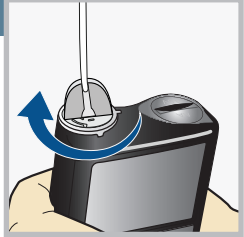Aseta säiliö pumppuun.
- 

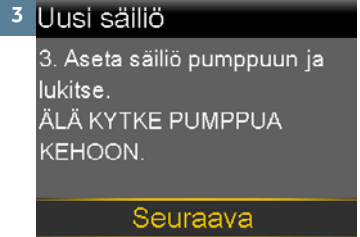2
Käännä säiliötä myötäpäivään, kunnes tunnet sen lukkiutuvan paikalleen.
- 

3 Uusi säiliö
3. Aseta säiliö pumppuun ja lukitse.
ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.
Seuraava

Valitse **Seuraava**.



HUOMAUTUS: älä koskaan täytä letkua, kun se on liitettyä kehoon.

SÄILIÖN JA INFUUSIOSETIN VAIHTAMINEN

ASENNA SÄILIÖ JA TÄYTÄ LETKU

Asenna säiliö ja täytä letku noudattamalla seuraavia ohjeita.

1 Asenna säiliö

Paina Asenna, kunnes valmis. ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.

Asenna Seuraava



Valitse **Asenna** ja pidä  -painike painettuna.

2 Asenna säiliö

Valmis

ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.

Asenna Seuraava



Kun näet tämän näytön, valitse **Seuraava**.


3 Täytä letku

ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.

Paina Täytä, kunnes näet pisaroita, ja valitse Seuraava.

0.0 U

Täytä Seuraava

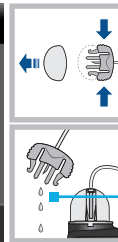

Pisaroita letkun päässä

Poista infuusiokohdan liittimen valkoinen suojus painamalla infuusiokohdan liittintä molemmilta puolilta ja vetämällä sitten valkoinen suojus irti.

Valitse **Täytä** ja pidä  -painike painettuna, kunnes näet pisaroita letkun päässä. Vapauta sitten painike.

4 Täytä letku

ÄLÄ KYTKE PUMPPUA KEHOON.

Paina Täytä, kunnes näet pisaroita, ja valitse Seuraava.

11.3 U

Täytä Seuraava

Kun näet pisaroita, paina  -painiketta ja valitse **Seuraava**.

ASETA INFUUSIOSETTI PAIKALLEEN


Aseta seuraavaksi infuusiosetti kehoon noudattamalla seuraavia ohjeita.

Täytä kanyyli?


1. Aseta infuusiosetti kehoon.

2. Täytä kanyyli valitsemalla Täytä tai valitse Valmis, jos täyttöä ei tarvita.


Täytä Valmis

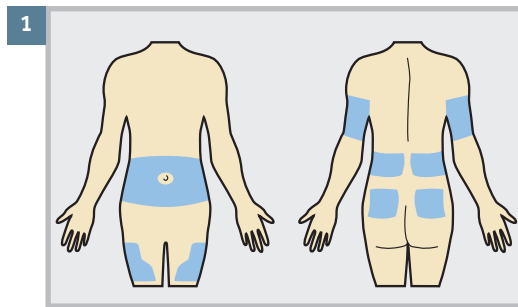

Valitse asetuskohdan kuvan varjostetuilta alueilta. Pyyhi se alkoholilla tai muulla antiseptisellä aineella.

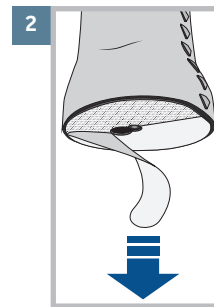

Irrota teipin taustapaperi. Varo koskemasta teippiin.

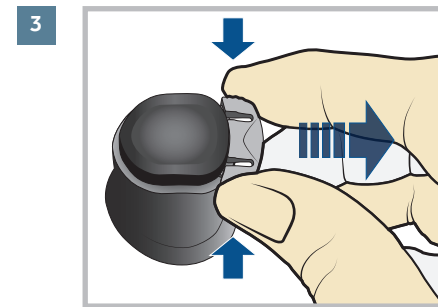

Poista irrotuskansi (pieni tulppa painikkeen alapuolella) painamalla sitä varovasti molemmilta puolilta ja vetämällä se sitten irti asettimesta.

Säilytä irrotuskansi, jotta voit liittää sen kanyylikoteloon, kun irrotat letkun.

SÄILIÖN JA INFUUSIOSETIN VAIHTAMINEN

ASETA INFUUSIOSETTI PAIKALLEEN (JATKUU)

4

Letku liitetään tähän

Nuolet

Asettimen kohonuolet osoittavat letkun kulkusuunnan, kun se on liitettynä.

Venytä iho tasaiseksi. Aseta asetin haluamaasi kohtaan iholle.

Aseta infuusiosetti sitten paikalleen painamalla yläpainike aivan alas asti.

5

Poista asetin vetämällä se kevyesti ja varovasti suoraan poispäin kehosta.

6

Painele teippi ihollesi sormin. Vaihda infuusiosetti, jos teippi ei tartu ihoon.

7

Pitele kanyylikoteloä paikallaan varovasti sormen avulla. Paina sitten infuusiokohdan liitintä suoraan kanyylikotelon sisään, kunnes kuulet napsahduksen.

Hävitä asetin laittamalla se asianmukaiseen pistävän ja viiltävän jätteen astiaan ja paikallisten lakien mukaisesti.

TÄYTÄ KANYYLI

Täytä nyt kanyyli eli pieni ihonalainen letku insuliinilla.

1 Täytä kanyyli?

1. Aseta infuusiosetti kehoon.
2. Täytä kanyyli valitsemalla Täytä tai valitse Valmis, jos täyttöä ei tarvita.

Täytä Valmis

Valitse **Täytä**.

2 Kan. täyttö

1. Vahvista täyttömäärä.
2. Kun valmis, valitse Täytä nyt. Peruuta: valitse Takaisin.

Täyttömäärä --- U

Täytä nyt

Valitse **Täyttömäärä** ja syötä 0,600 U insuliinia. Paina sitten **U**-painiketta.




HUOMAUTUS: Pumppu muistaa viimeksi käyttämäsi **Täyttömäärä**-arvon. Tarkista aina, että täyttömäärä on oikea.

- Jos se on oikea, valitse **Täytä nyt** painamalla **✓**-painiketta ja paina **U**-painiketta.
- Jos se on väärä, paina **U**-painiketta. Muuta arvoksi oikea määrä ja paina **U**-painiketta. Valitse **Täytä nyt**.

SÄILIÖN JA INFUUSIOSETIN VAIHTAMINEN

TÄYTÄ KANYyli (JATKUU)

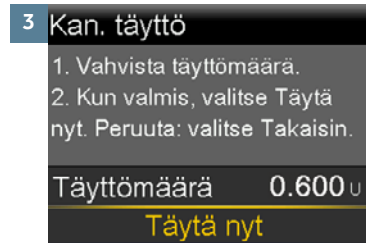

Valitse **Täytä nyt**.



Perusnäytössä näkyy insuliinin määrä, kun sitä täytetään kanyyliin.




HUOMAUTUS: Valitse **Pysäytä täyttö** vain silloin, kun pysäytys on tarpeen, kuten huomattuasi, että **Yht.**-määrä on väärä. Näin käy erittäin harvoin, jos olet tarkistanut **Täyttömäärä**-arvon edellisessä näytössä.


Infuusiosetin vaihto on nyt suoritettu loppuun.

Muista tarkistaa verensokeri 1–3 tunnin kuluttua infuusiosetin vaihtamisesta.


INFUUSIOSETIN IRROTTAMINEN KEHOSTA

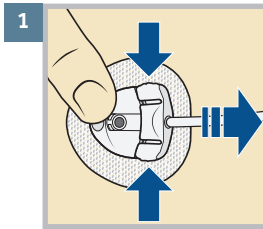

Pidä kanyylikoteloä varovasti paikallaan sormen avulla irrotusta varten. Paina sitten infuusiokohdan liittintä molemmilta puolilta ja vedä se ulos kanyylikotelosta.

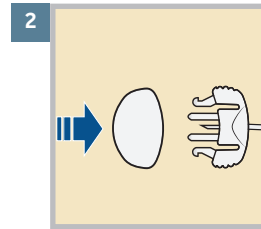


Kiinnitä valkoinen suojus infuusiokohdan liittimeen.

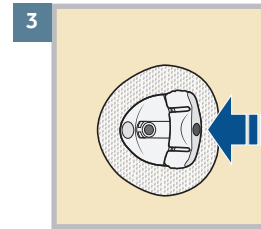


Kiinnitä irrotuskansi kanyylikoteloon. Paina sitten kantta kanyylikoteloon, kunnes kuulet napsahduksen.

INFUUSIOSETIN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN KEHOON

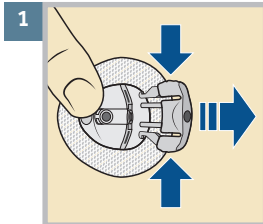


Pidä kanyylikoteloä varovasti paikallaan sormen avulla. Paina sitten irrotuskantta molemmilta puolilta ja vedä se ulos kanyylikotelosta.

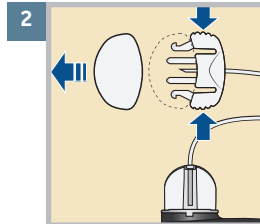

Poista infuusiokohdan liittimen valkoinen suojus painamalla infuusiokohdan liittintä molemmilta puolilta ja vetämällä sitten valkoinen suojus irti.

3 Varmista, ettei letkussa ole ilmaa. Jos letkussa on ilmaa, täytä letku insuliinilla tämän asiakirjan aiempien ohjeiden mukaisesti.

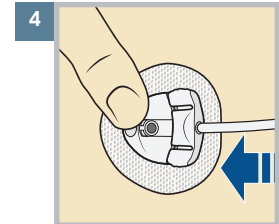

Pidä kanyylikoteloä varovasti paikallaan sormen avulla. Paina infuusiokohdan liittintä kanyylikotelon sisään, kunnes kuulet napsahduksen.