

NUR DAS RESERVOIR WECHSELN

BEGINNEN SIE HIER



1

Waschen Sie sich gründlich die Hände.



2 Menü

Abgabe unterbrechen
Audioeinstellungen
Speicher
Reservoir & Set
Insulineinstellungen


Drücken Sie . Wählen Sie **Reservoir & Set**.



3 Reservoir & Set

Neues Reservoir
Kanüle füllen

Wählen Sie **Neues Reservoir**.


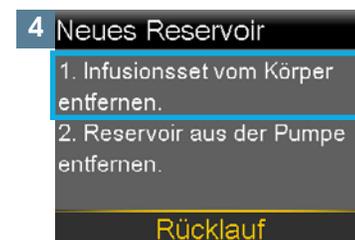


4 Neues Reservoir

1. Infusionsset vom Körper entfernen.
2. Reservoir aus der Pumpe entfernen.

Rücklauf

Trennen Sie den Schlauch vom Kanülengehäuse. Das Kanülengehäuse bleibt an Ihrem Körper.

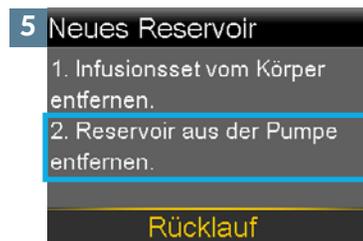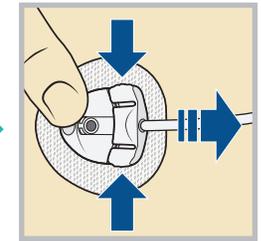

5 Neues Reservoir

1. Infusionsset vom Körper entfernen.
2. Reservoir aus der Pumpe entfernen.

Rücklauf




Entnehmen Sie das gebrauchte Reservoir aus der Pumpe.



Entsorgen Sie das gebrauchte Reservoir gemäß den örtlich geltenden Gesetzen in einem geeigneten Behälter.

Trennen Sie den Schlauchkonnektor des Infusionssets vom gebrauchten Reservoir. Legen Sie den Schlauch auf eine saubere Fläche. Werfen Sie ihn nicht weg.

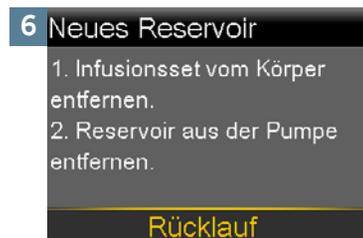

6 Neues Reservoir

1. Infusionsset vom Körper entfernen.
2. Reservoir aus der Pumpe entfernen.

Rücklauf



Läuft zurück

Bitte warten...

Wenn der Schlauch des Infusionssets von Ihrem Körper getrennt ist und das Reservoir aus der Pumpe entnommen wurde, wählen Sie **Rücklauf**.



Neues Reservoir

1. Reservoir füllen.
2. Schlauch an Reservoir anschließen.
NICHT MIT DEM KÖRPER VERBINDEN.

Weiter

Fahren Sie mit „Füllen des Reservoirs“ auf der nächsten Seite fort.




HINWEIS: Das Extended Wear Infusionsset kann bis zu 7 Tage lang verwendet werden. Das Reservoir kann bis zu 3 Tage oder bis zu 7 Tage verwendet werden; beachten Sie dazu die Gebrauchsanweisung zu Ihrem Reservoir. Füllen Sie das Reservoir mit genug Insulin für die Zeit bis zum nächsten Wechsel des Infusionssets, um eine Insulinverschwendung zu vermeiden.


Tauschen Sie beim Wechseln des Infusionssets alle zugehörigen Teile aus (Kanülengehäuse, Schlauch und Reservoir).

NUR DAS RESERVOIR WECHSELN


RESERVOIR FÜLLEN UND AN INFUSIONSSET ANSCHLIESSEN

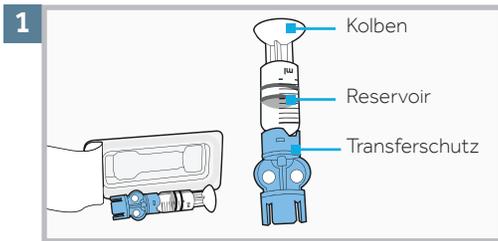


1 Nehmen Sie das Reservoir aus der Verpackung. Achten Sie darauf, dass das Insulinfläschchen Raumtemperatur hat, um das Risiko von Luftblasen zu verringern.

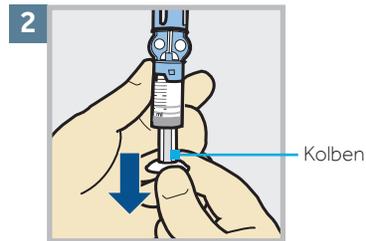


2 Ziehen Sie den Kolben bis zu der Stelle, bis zu der Sie das Fläschchen mit Insulin füllen möchten.

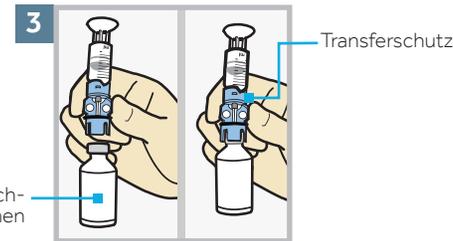


3 Wischen Sie das Fläschchen mit Alkohol ab. Stellen Sie das Fläschchen auf den Tisch. Drücken Sie den **blauen** Transferschutz fest auf das Fläschchen.

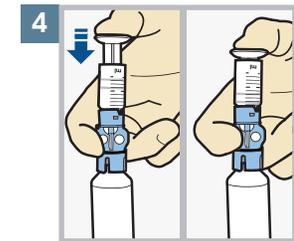


4 Drücken Sie den Kolben herunter und halten Sie ihn gedrückt.

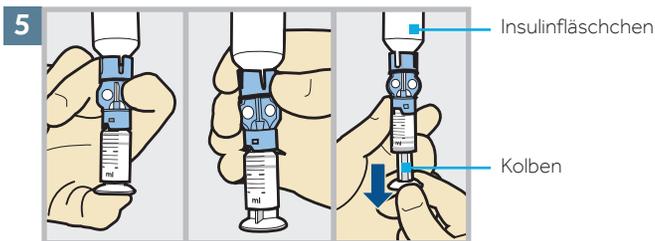

5 Mit dem Daumen noch auf dem Kolben drehen Sie beides um, sodass das Fläschchen oben ist. Nehmen Sie Ihren Daumen weg und ziehen Sie den Kolben herunter, um das Reservoir mit Insulin zu füllen.

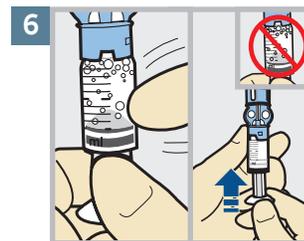


6 Klopfen Sie gegen das Reservoir, um Luftblasen nach oben zu bewegen. Drücken Sie den Kolben nach oben, um die Luft in das Fläschchen zu drücken.

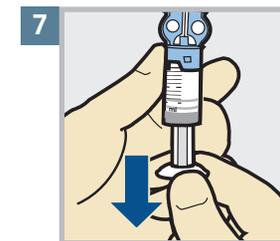

7 Ziehen Sie den Kolben zurück bis zu der Insulinmenge, die Sie benötigen.



WARNUNG Falls Flüssigkeit an den Reservoir-Kopf oder in den Konnektor des Schlauchs gelangt, dürfen Sie das Reservoir bzw. das Infusionsset nicht verwenden. Flüssigkeit kann die Öffnungen vorübergehend blockieren. Dies kann zur Folge haben, dass zu wenig oder zu viel Insulin abgegeben wird, was in Hyper- oder Hypoglykämien resultieren kann. Falls irgendeine Flüssigkeit an den Reservoir-Kopf oder in den Konnektor des Schlauchs gelangt, verwenden Sie ein neues Reservoir und Infusionsset.

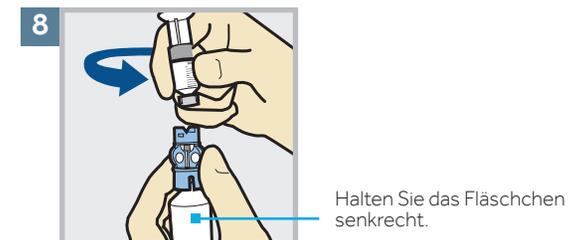


8 Um zu verhindern, dass Insulin an den Reservoir-Kopf gelangt, kippen Sie das Fläschchen, sodass es aufrecht ist. Halten Sie den Transferschutz, drehen Sie das Reservoir entgegen dem Uhrzeigersinn und entfernen Sie es vom Transferschutz.


NUR DAS RESERVOIR WECHSELN

ANSCHLIESSEN DES RESERVOIRS AN DEN INFUSIONSSCHLAUCH


Jetzt bringen Sie den Konnektor des Schlauchs am befüllten Reservoir an.

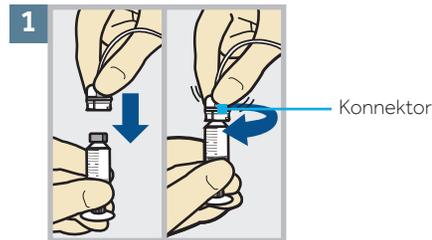

Drücken Sie den Konnektor des Schlauchs vorsichtig auf das Reservoir. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Sie hören ein Klicken.

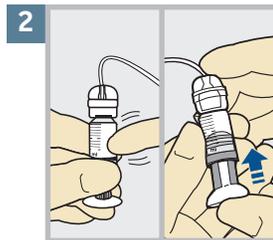

Wenn Sie Luftblasen sehen, klopfen Sie gegen das Reservoir, um sie nach oben zu bewegen. Drücken Sie den Kolben nur ganz wenig ein, um sie in den Schlauch zu drücken.

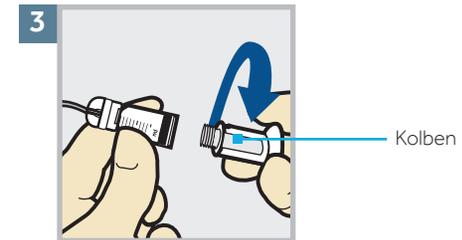

Drehen Sie den Kolben entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn zu lockern, und entfernen Sie ihn.

MÖGLICHERWEISE IST DIE BELEUCHTUNG AUSGESCHALTET.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.



Drücken Sie , um das Menü zu öffnen. Ist die Pumpe gesperrt, müssen Sie die Pumpe nach Drücken von  entsperren.


Wählen Sie **Weiter**.

RESERVOIR IN DIE PUMPE EINSETZEN


Als Nächstes setzen Sie das befüllte Reservoir in das Reservoirfach der Pumpe ein.



Setzen Sie das Reservoir in die Pumpe ein.

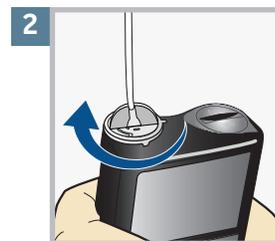

Drehen Sie das Reservoir im Uhrzeigersinn, bis es fühlbar einrastet.

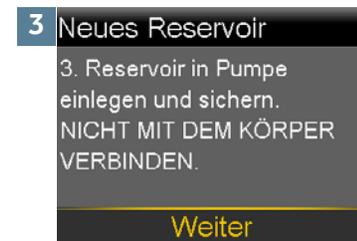

Wählen Sie **Weiter**.

NUR DAS RESERVOIR WECHSELN

FÜLLEN VON RESERVOIR UND SCHLAUCH

Befolgen Sie diese Schritte, um das Reservoir zu füllen und den Schlauch zu befüllen.

1 Reservoir füllen

„Füllen“ wählen und halten, bis fertig. **NICHT MIT KÖRPER VERBINDEN.**

Füllen Weiter



Wählen Sie **Füllen** und halten Sie **○** gedrückt.

2 Reservoir füllen

Abgeschlossen

NICHT MIT KÖRPER VERBINDEN.

Füllen Weiter



Wenn Sie diese Anzeige sehen, wählen Sie **Weiter**.

3 Schlauch füllen

NICHT MIT KÖRPER VERBINDEN. „Füllen“ wählen, halten, bis Tropfen sichtbar. Dann „Weiter“.

0.0 **Füllen** Weiter



Tropfen am Schlauchende

Wählen Sie **Füllen** und halten Sie **○** gedrückt, bis Sie Tropfen am Schlauchende sehen; lassen Sie dann los.

4 Schlauch füllen

NICHT MIT KÖRPER VERBINDEN. „Füllen“ wählen, halten, bis Tropfen sichtbar. Dann „Weiter“.

2.4 **Füllen** Weiter

Wenn Sie Tropfen sehen, drücken Sie **>** und wählen Sie **Weiter**.

WIEDERANSCHLIESSEN DES INFUSIONSSETS

Befolgen Sie die Schritte zum erneuten Anschließen des Infusionssettschlauchs an das Kanülengehäuse an Ihrem Körper.



WARNUNG Füllen Sie die Kanüle NICHT. Wählen Sie Fertig. Wenn das Infusionsset wieder angeschlossen wird, nachdem nur das Reservoir ausgetauscht wurde, kann das Befüllen der Kanüle zu einer erhöhten Insulinabgabe und folglich zu einer Hypoglykämie führen.


1 Kanüle füllen?

1. Infusionsset am Körper anlegen.
2. Kanüle füllen: „Füllen“ wählen. Falls nicht erforderlich: „Fertig“ wählen

Füllen **Fertig**

Es ist nicht nötig, die Kanüle zu füllen, weil Sie das Infusionsset nicht gewechselt haben.

Drücken Sie **>** und wählen Sie **Fertig**.

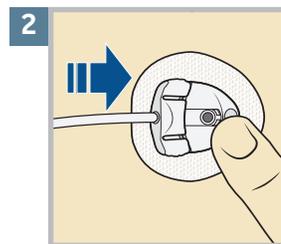

Halten Sie das Kanülengehäuse vorsichtig mit Ihrem Finger fest. Schieben Sie dann das Schlauchverbindungsstück gerade in das Kanülengehäuse, bis Sie ein Klicken hören.

Lassen Sie sich ärztlich dazu beraten, wie Sie im Rahmen Ihrer Insulintherapie einen zu niedrigen Blutzucker behandeln.

Der Wechsel des Reservoirs ist jetzt abgeschlossen.

Denken Sie daran, 1 bis 3 Stunden nach dem Wechsel des Reservoirs Ihren Blutzucker zu messen.