


## RESERVOIR UND INFUSIONSSET WECHSELN

### BEGINNEN SIE HIER

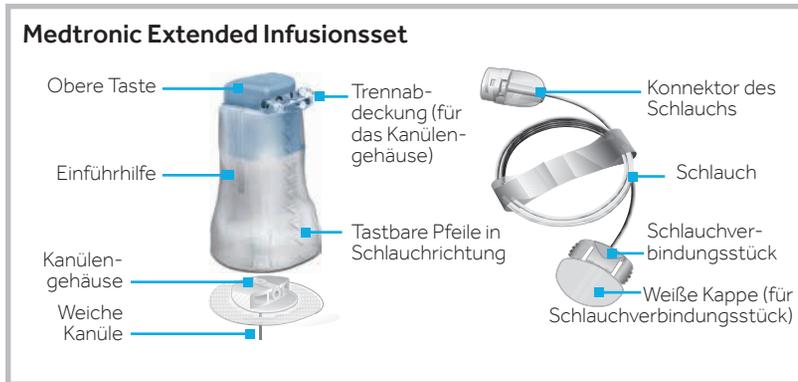

Waschen Sie sich gründlich die Hände.



Wählen Sie .





Wählen Sie **Neues Reservoir**.



**HINWEIS:** Das Extended Wear Infusionsset kann bis zu 7 Tage lang verwendet werden. Das Reservoir kann bis zu 3 Tage oder bis zu 7 Tage verwendet werden; beachten Sie dazu die Gebrauchsanweisung zu Ihrem Reservoir. Füllen Sie das Reservoir mit genug Insulin für die Zeit bis zum nächsten Wechsel des Infusionssets, um eine Insulinverschwendung zu vermeiden.


Tauschen Sie beim Wechseln des Infusionssets alle zugehörigen Teile aus (Kanülengehäuse, Schlauch und Reservoir).

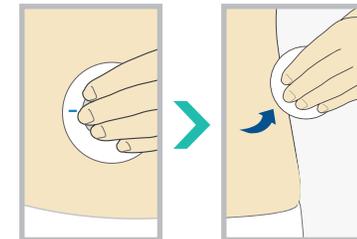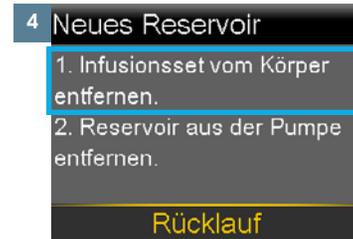

Entfernen Sie das Infusionsset, das Sie bisher verwendet haben, indem Sie das Pflaster lösen und vom Körper abziehen.



Entnehmen Sie das gebrauchte Reservoir aus der Pumpe.

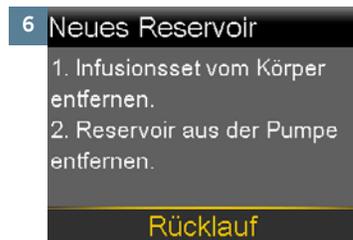

Wenn das Infusionsset von Ihrem Körper getrennt ist und das Reservoir aus der Pumpe entnommen wurde, wählen Sie **Rücklauf**.




Fahren Sie mit „Füllen des Reservoirs“ auf der nächsten Seite fort.


## RESERVOIR UND INFUSIONSSET WECHSELN

### FÜLLEN DES RESERVOIRS


Als Nächstes befüllen Sie das Reservoir mit Insulin.

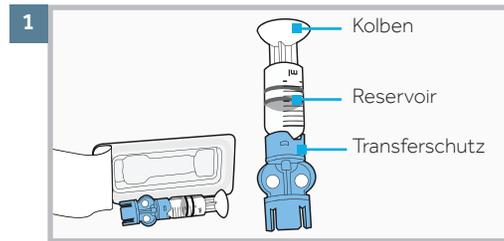


Nehmen Sie das Reservoir aus der Verpackung. Achten Sie darauf, dass das Insulinfläschchen Raumtemperatur hat, um das Risiko von Luftblasen zu verringern.

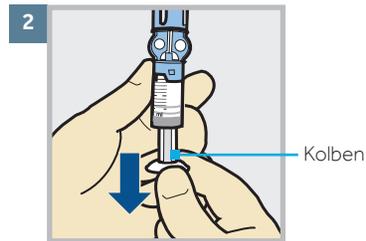


Ziehen Sie den Kolben bis zu der Stelle, bis zu der Sie das Fläschchen mit Insulin füllen möchten.

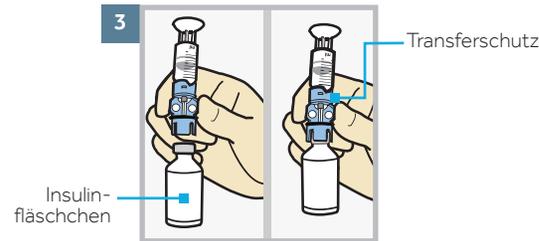


Wischen Sie das Fläschchen mit Alkohol ab. Stellen Sie das Fläschchen auf den Tisch. Drücken Sie den **blauen** Transferschutz fest auf das Fläschchen.

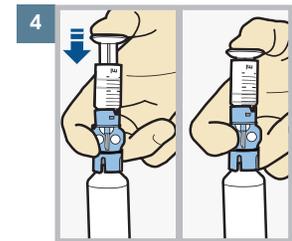


Drücken Sie den Kolben herunter und halten Sie ihn gedrückt.

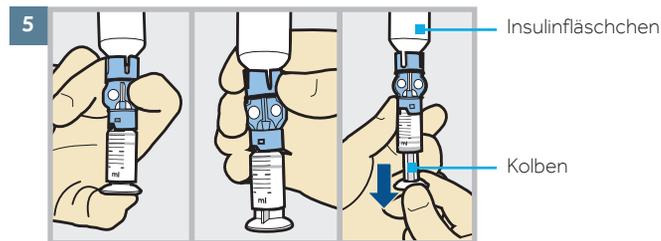

Mit dem Daumen noch auf dem Kolben drehen Sie beides um, sodass das Fläschchen oben ist. Nehmen Sie Ihren Daumen weg und ziehen Sie den Kolben herunter, um das Reservoir mit Insulin zu füllen.

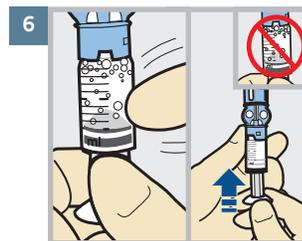

Klopfen Sie gegen das Reservoir, um Luftblasen nach oben zu bewegen. Drücken Sie den Kolben nach oben, um die Luft in das Fläschchen zu drücken.

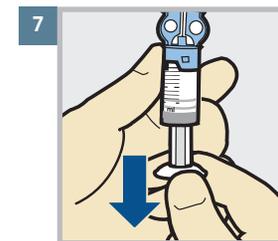


Ziehen Sie den Kolben zurück bis zu der Insulinmenge, die Sie benötigen.



**WARNUNG** Falls Flüssigkeit an den Reservoir-Kopf oder in den Konnektor des Schlauchs gelangt, dürfen Sie das Reservoir bzw. das Infusionsset nicht verwenden. Flüssigkeit kann die Öffnungen vorübergehend blockieren. Dies kann zur Folge haben, dass zu wenig oder zu viel Insulin abgegeben wird, was in Hyper- oder Hypoglykämien resultieren kann. Falls irgendeine Flüssigkeit an den Reservoir-Kopf oder in den Konnektor des Schlauchs gelangt, verwenden Sie ein neues Reservoir und Infusionsset.

**Lassen Sie sich ärztlich dazu beraten, wie Sie im Rahmen Ihrer Insulintherapie einen zu niedrigen Blutzucker behandeln.**

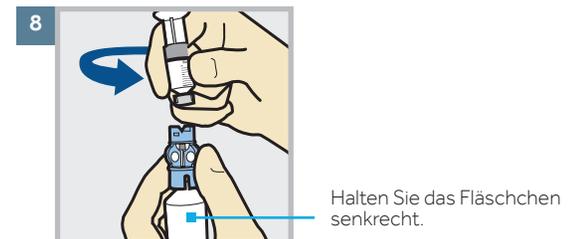


Um zu verhindern, dass Insulin an den Reservoir-Kopf gelangt, kippen Sie das Fläschchen, sodass es aufrecht ist. Halten Sie den Transferschutz, drehen Sie das Reservoir entgegen dem Uhrzeigersinn und entfernen Sie es vom Transferschutz.

## RESERVOIR UND INFUSIONSSET WECHSELN


### ANSCHLIESSEN DES RESERVOIRS AN DEN INFUSIONSSCHLAUCH

Jetzt bringen Sie den Konnektor des Schlauchs am befüllten Reservoir an.

- 1**

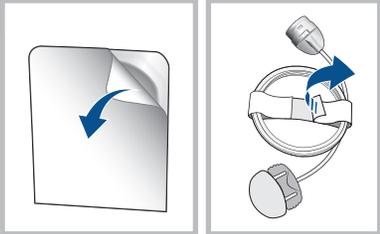


Nehmen Sie das Infusionsset aus der Packung. Entfernen Sie das Papier, das den Schlauch zusammenhält, und entrollen Sie den Schlauch.
- 2**

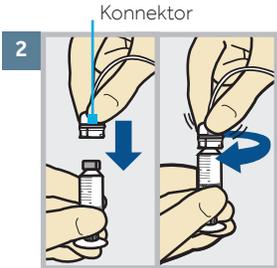


Konnektor

Drücken Sie den Konnektor des Schlauchs vorsichtig auf das Reservoir. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Sie hören ein Klicken.
- 3**

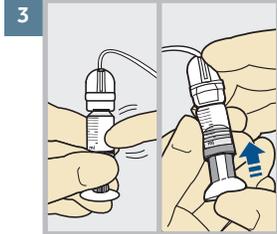

Wenn Sie Luftblasen sehen, klopfen Sie gegen das Reservoir, um sie nach oben zu bewegen. Drücken Sie den Kolben nur ganz wenig ein, um sie in den Schlauch zu drücken.
- 4**

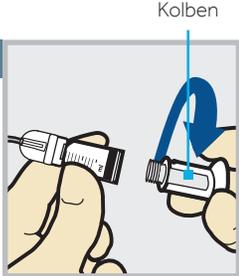

Kolben


Drehen Sie den Kolben entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn zu lockern, und entfernen Sie ihn.

**Möglicherweise ist die Beleuchtung ausgeschaltet.**

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.



Drücken Sie , um das Menü zu öffnen. Ist die Pumpe gesperrt, müssen Sie die Pumpe nach Drücken von  entsperren.

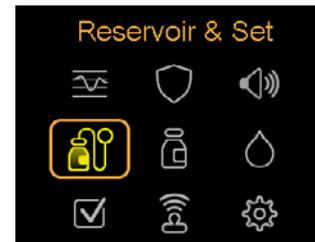

Wählen Sie .



**Neues Reservoir**

1. Reservoir füllen.
  2. Schlauch an Reservoir anschließen.
- NICHT MIT DEM KÖRPER VERBINDEN.**

**Weiter**

Wählen Sie **Weiter**.

### EINSETZEN DES RESERVOIRS IN DIE PUMPE

Als Nächstes setzen Sie das befüllte Reservoir in das Reservoirfach der Pumpe ein.


- 1 Neues Reservoir**

**3. Reservoir in Pumpe einlegen und sichern.**  
**NICHT MIT DEM KÖRPER VERBINDEN.**

**Weiter**




Setzen Sie das Reservoir in die Pumpe ein.
- 2**

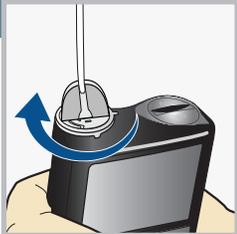

Drehen Sie das Reservoir im Uhrzeigersinn, bis es fühlbar einrastet.
- 3 Neues Reservoir**

**3. Reservoir in Pumpe einlegen und sichern.**  
**NICHT MIT DEM KÖRPER VERBINDEN.**

**Weiter**

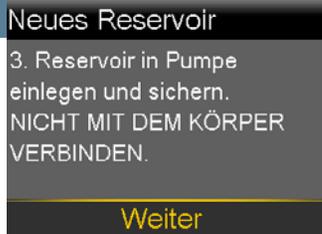

Wählen Sie **Weiter**.



**HINWEIS:** Befüllen Sie den Schlauch nie, während er mit Ihrem Körper verbunden ist.

## RESERVOIR UND INFUSIONSSET WECHSELN

### FÜLLEN VON RESERVOIR UND SCHLAUCH

Befolgen Sie diese Schritte, um das Reservoir zu füllen und den Schlauch zu befüllen.

**1 Reservoir füllen**  
 „Füllen“ wählen und halten, bis fertig. **NICHT MIT KÖRPER VERBINDEN.**  
  
**Füllen** Weiter

Wählen Sie **Füllen** und halten Sie **Füllen** gedrückt.

**2 Reservoir füllen**  
 Abgeschlossen  
**NICHT MIT KÖRPER VERBINDEN.**  
  
**Füllen** Weiter

Wenn Sie diese Anzeige sehen, wählen Sie **Weiter**.

**3 Schlauch füllen**  
**NICHT MIT KÖRPER VERBINDEN.** „Füllen“ wählen, halten, bis Tropfen sichtbar. Dann „Weiter“.  
 0.0   
**Füllen** Weiter

Entfernen Sie die weiße Kappe vom Schlauchverbindungsstück, indem Sie die Seiten des Schlauchverbindungsstücks zusammendrücken und dann die weiße Kappe abziehen.

Wählen Sie **Füllen** und halten Sie **Füllen** gedrückt, bis Sie Tropfen am Schlauchende sehen; lassen Sie dann los.


**4 Schlauch füllen**  
**NICHT MIT KÖRPER VERBINDEN.** „Füllen“ wählen, halten, bis Tropfen sichtbar. Dann „Weiter“.  
 11.3   
**Füllen** Weiter

Wenn Sie Tropfen sehen, drücken Sie **Weiter** und wählen Sie **Weiter**.


## ANLEGEN DES INFUSIONSSETS

Befolgen Sie dann diese Schritte, um das Infusionsset am Körper anzulegen.


**Kanüle füllen?**  
 1. Infusionsset am Körper anlegen.  
 2. Kanüle füllen: „Füllen“ wählen. Falls nicht erforderlich: „Fertig“ wählen.  
**Füllen** Fertig

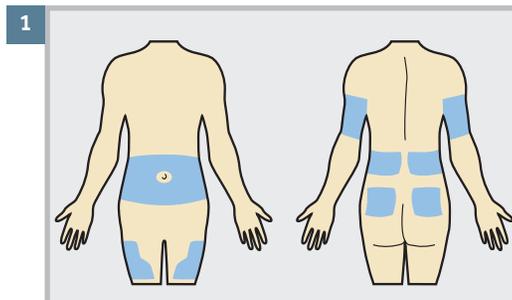

Wählen Sie eine Einstichstelle in einem der hier schattierten Bereiche. Wischen Sie die Stelle mit Alkohol oder einem anderen Desinfektionsmittel ab.

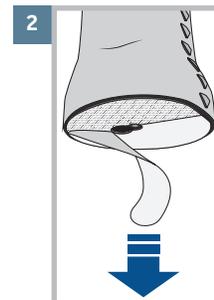

Entfernen Sie das Schutzpapier vom Pflaster. Achten Sie darauf, das Pflaster nicht zu berühren.


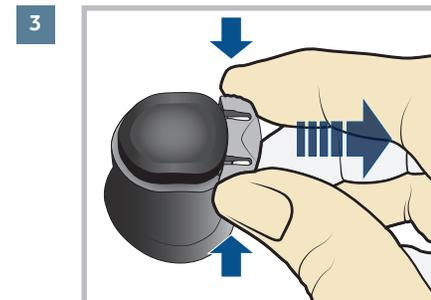


Entfernen Sie die Trennabdeckung (den kleinen Stecker unterhalb der Taste), indem Sie vorsichtig die Seiten der Trennabdeckung zusammendrücken und sie dann von der Einführhilfe abziehen.

Bewahren Sie die Trennabdeckung auf, um sie immer dann wieder in das Kanülengehäuse zu stecken, wenn Sie den Schlauch abkoppeln.

## RESERVOIR UND INFUSIONSSET WECHSELN


### ANLEGEN DES INFUSIONSSETS (FORTSETZUNG)

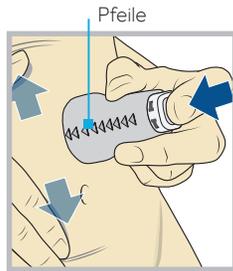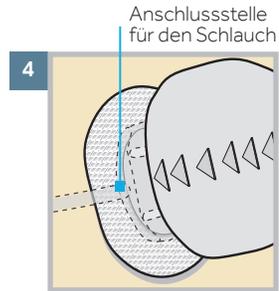


Die tastbaren Pfeile auf der Einführhilfe zeigen die Laufrichtung des Schlauchs, wenn er verbunden ist.

Spannen Sie die Haut, bis sie glatt ist. Setzen Sie die Einführhilfe auf die gewünschte Hautstelle.


Drücken Sie dann die obere Taste vollständig herunter, um das Infusionsset einzuführen.

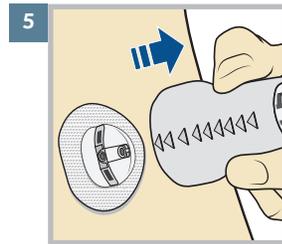

Nehmen Sie die Einführhilfe vorsichtig und sachte ab, indem Sie sie in einer geraden Bewegung vom Körper wegziehen.

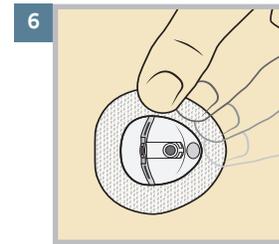

Drücken Sie das Pflaster mit Ihrem Finger auf die Haut. Tauschen Sie das Infusionsset aus, wenn das Pflaster nicht auf der Haut haften bleibt.

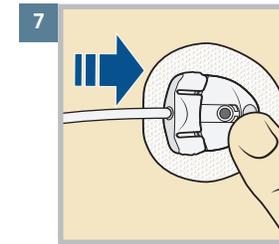

Halten Sie das Kanülengehäuse vorsichtig mit Ihrem Finger fest. Schieben Sie dann das Schlauchverbindungsstück gerade in das Kanülengehäuse, bis Sie ein Klicken hören.

Entsorgen Sie die Einführhilfe gemäß den örtlich geltenden Gesetzen in einem geeigneten Abfallbehälter für spitze und scharfe Gegenstände.

### FÜLLEN DER KANÜLE

Jetzt füllen Sie die Kanüle, den winzigen Schlauch unter der Haut, mit Insulin.



Wählen Sie **Füllen**.



Wählen Sie **Füllmenge** und geben Sie 0,600 U Insulin ein. Drücken Sie dann **Jetzt füllen**.




**HINWEIS:** Die Pumpe erinnert sich an die **Füllmenge**, die Sie zuletzt verwendet haben. Vergewissern Sie sich immer, dass die Füllmenge richtig ist.

- Wenn die Füllmenge stimmt, drücken Sie **✓**, bis **Jetzt füllen** ausgewählt ist. Drücken Sie dann **○**.
- Wenn die Füllmenge nicht stimmt, drücken Sie **○**. Stellen Sie die richtige Menge ein und drücken Sie **○**. Wählen Sie **Jetzt füllen**.

## RESERVOIR UND INFUSIONSSET WECHSELN

### FÜLLEN DER KANÜLE (FORTSETZUNG)

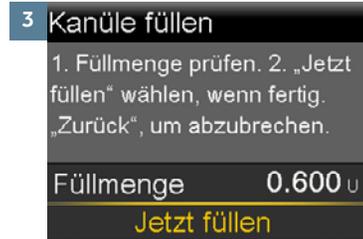

Wählen Sie **Jetzt füllen**.



Die Ausgangsanzeige zeigt das Insulin an, während es die Kanüle füllt.




**HINWEIS:** Wählen Sie nur dann **Füllen stoppen**, wenn Sie den Vorgang abbrechen müssen, beispielsweise weil Sie merken, dass die **Gesamtmenge** falsch ist. Das sollte nur selten passieren, wenn Sie immer in der vorherigen Anzeige die **Füllmenge** prüfen.


**Der Wechsel des Infusionssets ist jetzt abgeschlossen.**

Denken Sie daran, 1 bis 3 Stunden nach dem Wechsel des Infusionssets Ihren Blutzucker zu messen.


### ABKOPPELN DES INFUSIONSSETS VOM KÖRPER

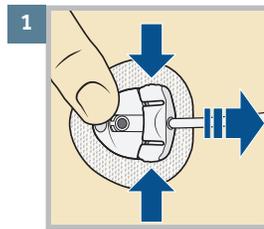

Zum Abkoppeln halten Sie das Kanülengehäuse vorsichtig mit Ihrem Finger fest. Drücken Sie dann die Seiten des Schlauchverbindungsstücks zusammen und ziehen Sie es aus dem Kanülengehäuse heraus.

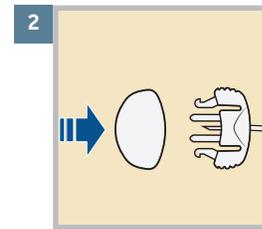


Setzen Sie die weiße Kappe auf das Schlauchverbindungsstück.

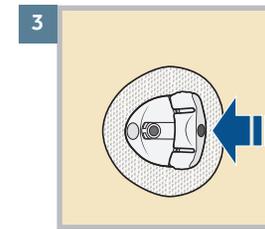


Setzen Sie die Trennabdeckung auf das Kanülengehäuse. Drücken Sie dann die Abdeckung in das Kanülengehäuse, bis Sie ein Klicken hören.

### WIEDERANSCHLIESSEN DES INFUSIONSSETS AM KÖRPER

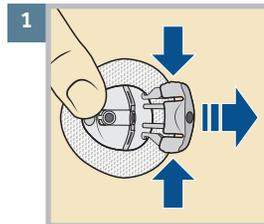


Halten Sie das Kanülengehäuse vorsichtig mit Ihrem Finger fest. Drücken Sie dann die Seiten der Trennabdeckung zusammen und ziehen Sie sie aus dem Kanülengehäuse heraus.

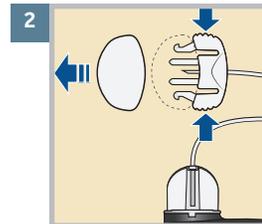

Entfernen Sie die weiße Kappe vom Schlauchverbindungsstück, indem Sie die Seiten des Schlauchverbindungsstücks zusammendrücken und dann die weiße Kappe abziehen.

3 Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch keine Luft enthält. Falls sich Luft im Schlauch befindet, befüllen Sie den Schlauch mit Insulin, wie weiter vorne in dieser Anleitung beschrieben.

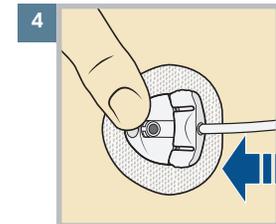

Halten Sie das Kanülengehäuse vorsichtig mit Ihrem Finger fest. Schieben Sie das Schlauchverbindungsstück in das Kanülengehäuse, bis Sie ein Klicken hören.