


INSTALLEREN VAN DE CARELINK™ UPLOADER

Ga naar <https://carelink.minimed.eu/>


Er zijn 2 manieren om te uploaden: **de voorkeur** heeft het automatisch uploaden via de MiniMed™ Mobile-app. Bekijk hiervoor de verkorte handleiding van de MiniMed™ Mobile-app.

Deze handleiding gebruikt u om uw MiniMed™ 780G-insulinepomp handmatig te uploaden naar CareLink™ Personal met de blauwe USB.

Om de nieuwe uploader te installeren volgt u deze stappen.

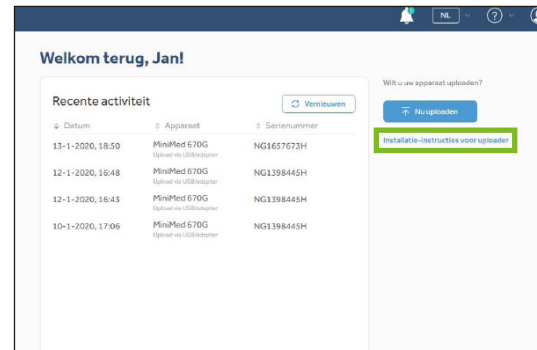


1 Klik op Installatie-instructie voor oploader om de nieuwste uploader te downloaden. Hiervoor heeft u administratierechten nodig op uw computer.

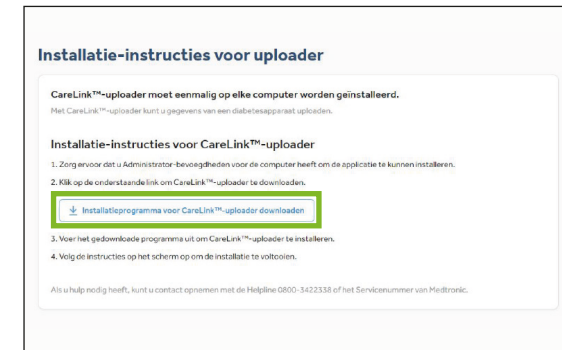

2 Klik op Installatieprogramma voor CareLink™-uploader downloaden en volg de stappen.

UPLOADEN VAN UW MINIMED™ 780G-INSULINEPOMP MET DE BLAUWE USB


Plaats de blauwe USB pas als hierom wordt gevraagd.

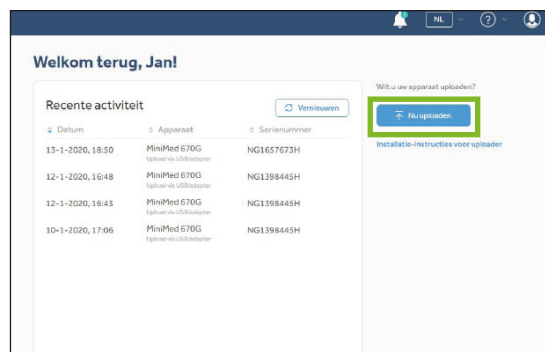

1 Klik op Nu uploaden




2 Klik op Nieuw apparaat toevoegen en vervolgens op MiniMed™-pomp

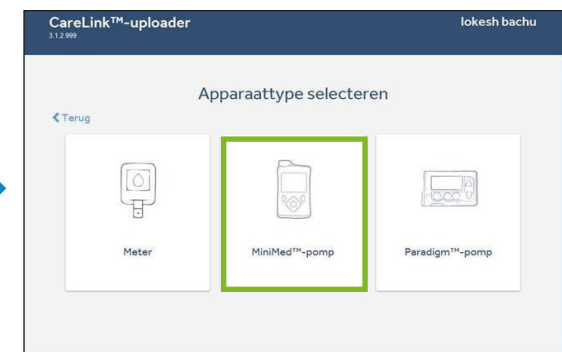


UPLOADEN VAN UW MINIMED™ 780G-INSULINEPOMP MET DE BLAUWE USB




3 Selecteer MiniMed™ 700 serie met Bluetooth®-technologie. Zodra u deze geselecteerd heeft zal het programma automatisch de blauwe USB zoeken.

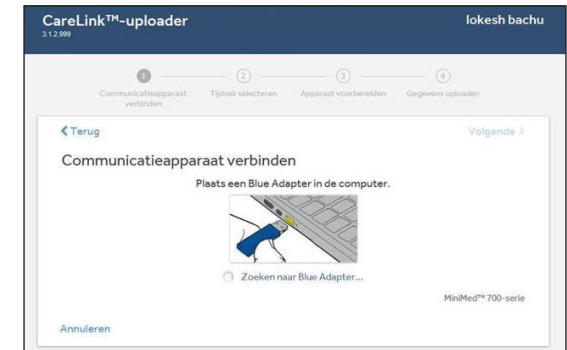

4 Plaats de blauwe USB in de USB-poort op de computer.

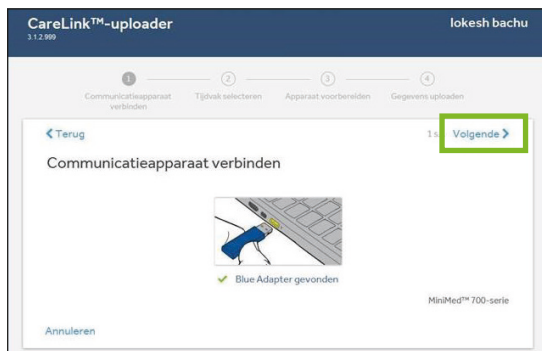


5 Zodra deze is gevonden, ontvangt u het bericht **blauwe USB gevonden**. **Selecteer Volgende** om door te gaan

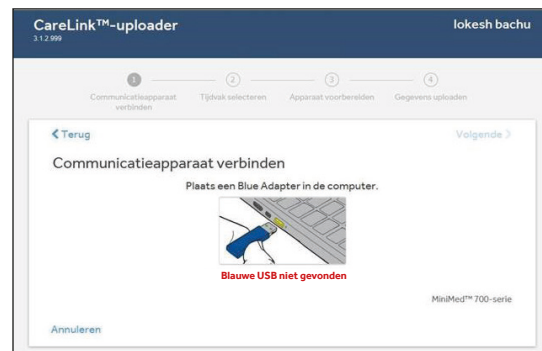


6 Als de blauwe USB niet snel genoeg wordt geplaatst, ontvangt u mogelijk het bericht **Blauwe USB niet gevonden**.

Verwijder de blauwe USB en plaats deze opnieuw en selecteer **Opnieuw proberen**.

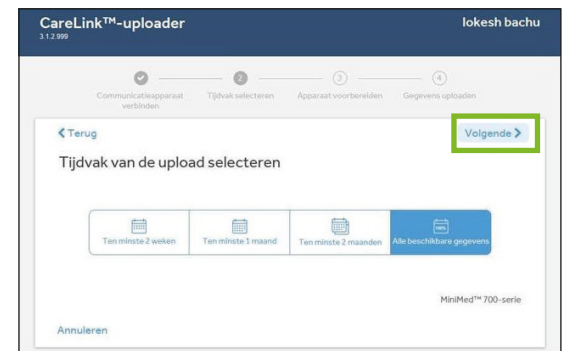


7 In deze stap kunt u een tijdbereik kiezen om te uploaden. Het standaardtijdsbereik is ingesteld op 2 weken geschiedenis om de tijd die nodig is om gegevens te uploaden te verminderen. Als dit niet gewenst is, selecteer dan het gewenste tijdsbereik om te uploaden en selecteer vervolgens **Volgende**. Upload-tijden kunnen langer duren.


UPLOADEN VAN UW MINIMED™ 780G-INSULINEPOMP MET DE BLAUWE USB

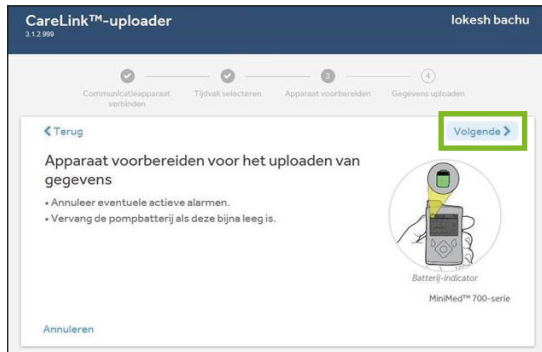

8 Bereid het apparaat voor op het uploaden van gegevens. Wis alle actieve alarmen en vervang de batterij in de pomp als deze bijna leeg is. **Selecteer Volgende.**

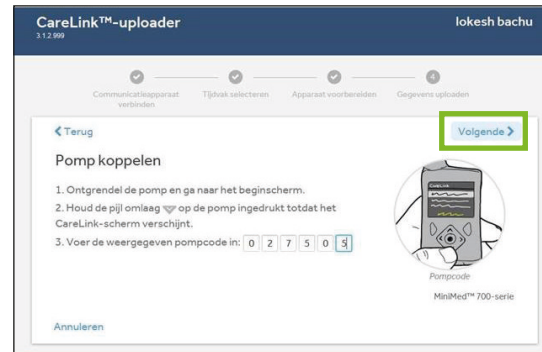

9 Koppel de pomp. Houd op het startscherm van de pomp de pijl-omlaag ingedrukt totdat het CareLink™-menu verschijnt. Voer de pompcode in die u in het pompscherm ziet. **Selecteer Volgende**

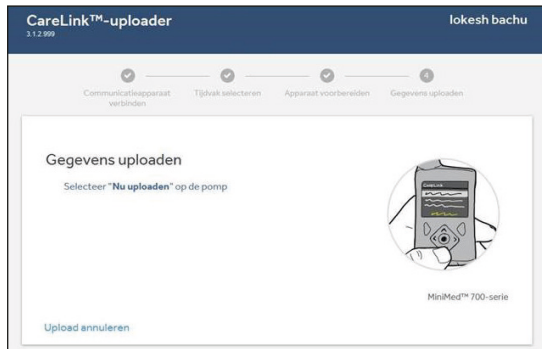

10 Selecteer Nu uploaden op de pomp. Deze stap moet worden voltooid voordat het uploadproces kan starten. De pomp gaat in time-out als **Nu uploaden** niet wordt ingedrukt binnen 2 minuten.



11 Om te zien dat de gegevensupload is begonnen:

- 1** U ziet een voortgang van CareLink™ Uploaderbalk op de computer.
- 2** Op de pomp ziet u een synchronisatiepictogram in de midden van het scherm vergelijkbaar met een **draaiende cirkel**.