



SYSTÈME MINIMED™ 780G

TRANSFERT DES DONNÉES VERS LE LOGICIEL CARELINK™ PERSONAL

Facile à utiliser et facile à partager.

POUR UN TRANSFERT RÉUSSI, ASSUREZ-VOUS QUE VOUS DISEPOSEZ DE TOUS LES ÉLÉMENTS REQUIS

- Vous devez avoir votre adaptateur bleu à portée de main.
- Accédez à la page carelink.minimed.eu sur votre ordinateur portable.
- Connectez-vous à votre compte.



VÉRIFIEZ QUE VOTRE POMPE EST PRÊTE POUR LE TRANSFERT.

Assurez-vous qu'aucun de ces écrans ne s'affiche sur la pompe.

- Alarmes actives
- Pile faible



Medtronic

SYSTÈME MINIMED™ 780G

TRANSFERT DES DONNÉES DE VOTRE POMPE

CONNECTER VOTRE POMPE




1 Cliquez sur "Télétransmettre maintenant" et attendez que l'écran de l'application de transfert des données s'affiche.

PREMIER TRANSFERT




2 Sélectionnez "Ajouter un nouvel appareil".

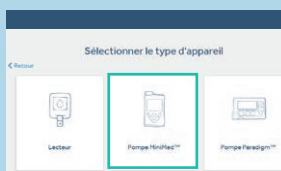

3 Sélectionnez "Pompe MiniMed™".



4 Sélectionnez le type de votre pompe. Si vous ne le connaissez pas, cliquez sur "Aide pour identifier la pompe".

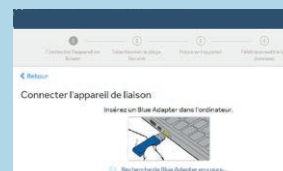

5 Connectez l'adaptateur bleu et suivez les instructions de la section "Transférer vos données" ci-dessous.

TRANSFERTS ULTÉRIEURS




2 Sur l'écran "Sélectionner le type d'appareil", sélectionnez l'appareil dont vous souhaitez transférer les données.



3 Connectez l'adaptateur bleu et transférez vos données en suivant les instructions de la section "Transférer vos données" ci-dessous.

TRANSFÉRER VOS DONNÉES

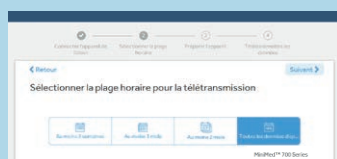

1 Sélectionnez la plage horaire pour le transfert.



2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour préparer l'appareil au transfert des données.




3 Entrez le numéro de série de votre pompe. L'appairage est nécessaire à chaque transfert.



4 Sélectionnez "Télétransmettre maintenant" sur la pompe.



5 Patientez jusqu'à ce que le transfert se termine.

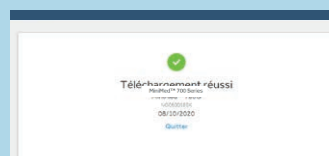

6 Transfert réussi.

DES INFORMATIONS PERSONNALISÉES SUR VOTRE DIABÈTE POUR PRENDRE ACTIVEMENT PART À VOTRE TRAITEMENT

Medtronic Belgium SA
Avenue du Bourgmeestre Etienne Demunter 5
BE-1090 Bruxelles
Be Tél : 0800 908 05
(numéro gratuit)
Lux Tél : 800-27441
(numéro gratuit depuis un poste fixe)
Depuis l'étranger : +31 (0)45 566 82 91

www.medtronic-diabetes.be

Informations de sécurité : logiciel CareLink™

Le logiciel CareLink™ est conçu pour aider les personnes atteintes de diabète à gérer leur maladie et NON comme une solution de traitement en elle-même. Pour des informations détaillées concernant le mode d'emploi, les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les effets secondaires potentiels, veuillez consulter le manuel du dispositif.

UC202105900 FB © 2020 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo Medtronic et Further, Together sont des marques commerciales de Medtronic. ™ Les marques tierces sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques sont des marques commerciales d'une société de Medtronic.