


# INFORME DE AYUDA DEL BOLO DE COMIDA

Medtronic CareLink™ Personal software

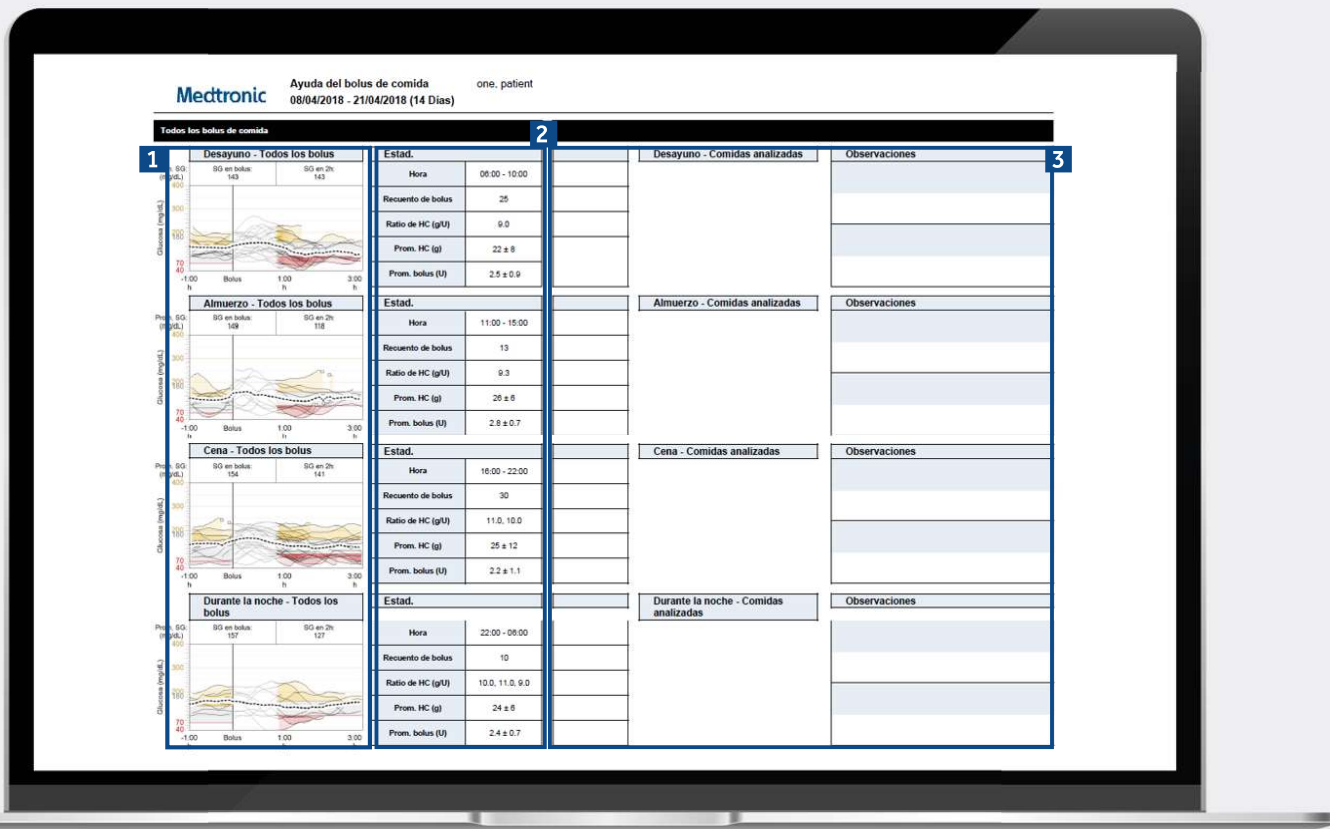

Información representativa de un paciente.

- 1 Todas las comidas de la franja de tiempo seleccionada se mostrarán en la sección de cada comida. Por ejemplo, si el desayuno está configurado de 06:00 a 08:00, todos los bolos administrados en esa franja horaria se mostrarán en la sección del desayuno. Consejo: Asegúrate de que tus ajustes temporales son lo suficientemente amplios para ajustarse a los distintos horarios de comidas del fin de semana.
- 2 Las estadísticas muestran tu ratio de carbohidratos para una revisión sencilla, así como el número de bolos que te estás administrando. También puedes ver cuáles son tus preferencias temporales para las comidas actualmente.
- 3 Esta sección del informe se deja en blanco, para que al imprimir tu informe puedas hacer anotaciones sobre él.

## NOTAS