

# INFORME DE ADHERENCIA

Medtronic CareLink™ Personal

Medtronic Cumplimiento (1 de 1) one\_patient  
08/04/2018 - 21/04/2018

	Mediciones de glucosa <b>2</b>		Eventos de bolus <b>3</b>				Eventos de llenado					Duración de la susp. (h:mm) <b>4</b>	
	Lecturas de GS <b>1</b>	Duración del sensor (h:mm)	Bolus manuales	Eventos de Bolus Wizard	Con comida	Con corrección	Anulado	Rebobinar	Llenados de cánula	Cantidad en cánula (U)	Llenados de tubo		Cantidad en tubo (U)
Domingo 08/04/2018	6	21:20		9	6	4		1	1	0.3	1	8.6	0:46
Lunes 09/04/2018	10	23:30		8	4	4							0:15
Martes 10/04/2018	8	24:00		8	6	1							
Miércoles 11/04/2018	5	24:00		6	5	2							0:21
Jueves 12/04/2018	3	24:00		8	6	1							
Viernes 13/04/2018	8	24:00		9	5	4		1	1	0.3	1	10.2	0:21
Sábado 14/04/2018	4	24:00		6	6	1							
Domingo 15/04/2018	6	21:10		8	6	3		1	1	0.3	1	3.2	0:05
Lunes 16/04/2018	10	24:00		11	7	4							
Martes 17/04/2018	8	24:00		12	9	4							0:22
Miércoles 18/04/2018	4	24:00		9	7	3							0:36
Jueves 19/04/2018	7	24:00		15	10	5		1	1	0.3	1	12	0:06
Viernes 20/04/2018	4	23:55		10	8	2							
Sábado 21/04/2018	1	8:05		3	3	1							0:42
Resumen	6.4/día	13d 02h 00m	0.0/día	9.2/día	72.1%	32.0%	0.0%	4	4	0.3U /llenado	4	8.5U /llenado	3h 34m

Información representativa de un paciente.

- 1 Lista cuántas glucemias capilares se han realizado cada día, con una media del periodo seleccionado en la parte inferior de cada día.
- 2 Esta columna muestra cuánto tiempo al día has llevado el sensor, con una media diaria al final. Si no has llevado un sensor, este campo se mostrará en blanco.
- 3 Estas dos columnas muestran cuántos bolos manuales y bolos con ayuda del Bolus Wizard te has administrado. Deberías intentar realizar el menor número de bolos manuales posibles. En las siguientes columnas se muestra si el bolo se ha administrado con la ingesta de carbohidratos, si se trata de un bolo de corrección o si se ha anulado el Bolus Wizard.
- 4 Esta columna representa cuánto tiempo al día has estado en suspensión de insulina, los símbolos de colores denotan el tipo de suspensión. La leyenda que explica los símbolos se encuentra al final del informe.
- 5 En estas columnas se reflejan los llenados de cánula y rebobinado de reservorio registrados. Deberías intentar cambiar tu set de infusión y reservorio cada 2-3 días.

## NOTAS