


INFORME DIARIO

Medtronic CareLink™ Personal

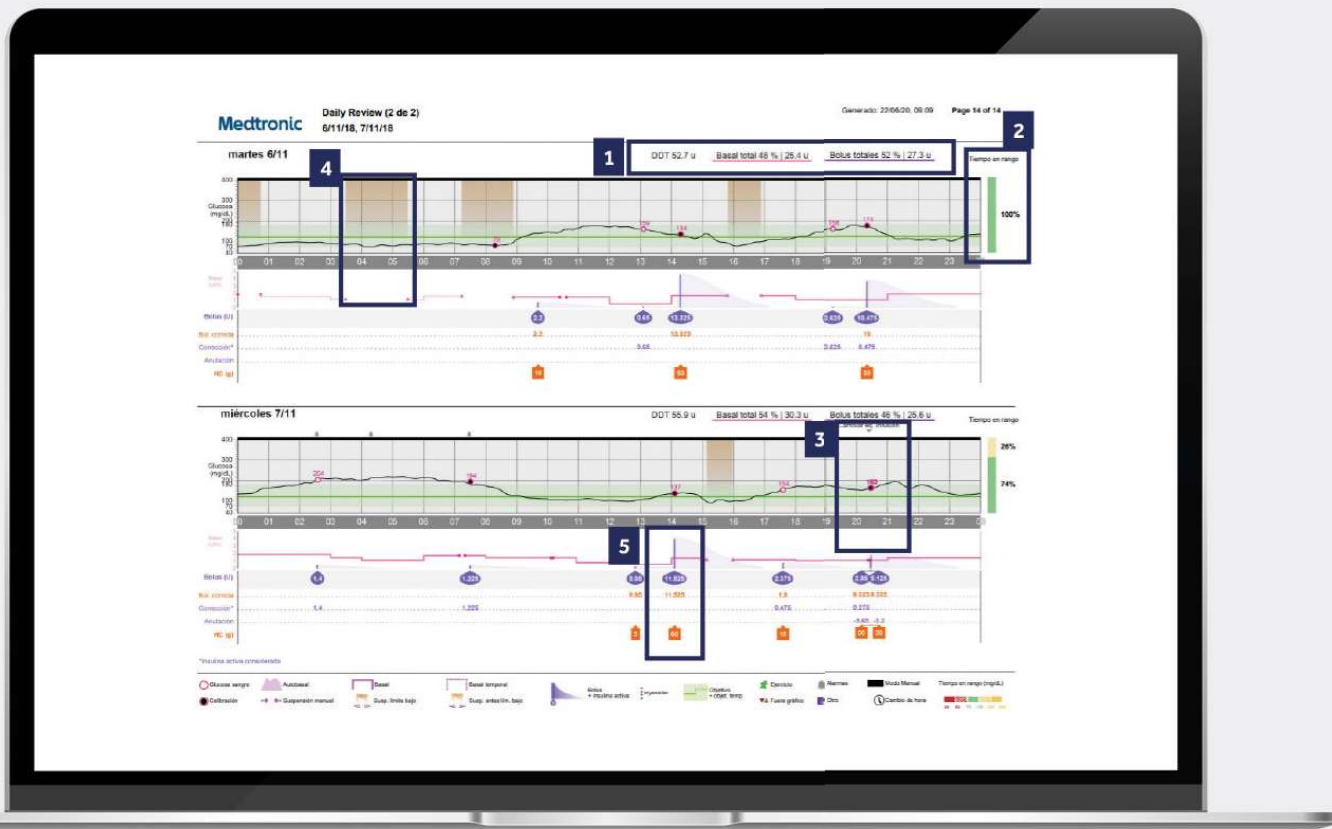

Información representativa de un paciente.

- 1 El total de insulina administrada y el reparto entre insulina basal y bolos.
- 2 Tiempo en rango para ese día en particular.
- 3 Un ejemplo del cambio del set de infusión - tu bomba suspende la infusión de insulina durante el cambio del set y el reservorio. Consejo: recomendamos cambiar el set de infusión y el reservorio cada 2-3 días.
- 4 Las zonas naranjas del gráfico representan el momento en que la bomba ha utilizado la suspensión de infusión de insulina de SmartGuard™ para evitar una hipoglucemia.
- 5 Un detalle de la administración de insulina en un bolo. Solo disponible en modo manual.

NOTAS