


INFORME SEMANAL

Medtronic CareLink™ Personal

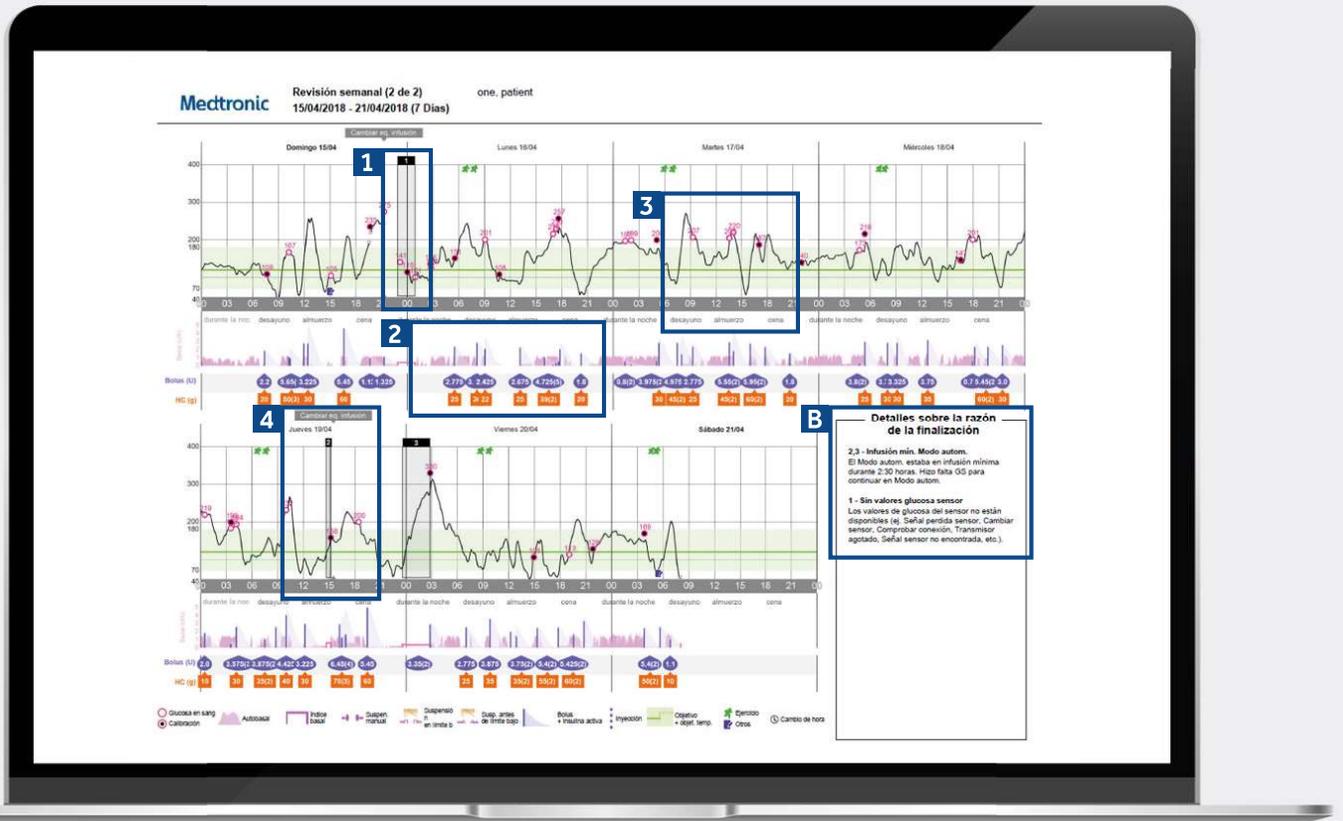

Información representativa de un paciente.

- 1 Las cajas negras indican periodos en los que tu bomba ha salido del modo automático. Los números corresponden al detalle del motivo de la salida de la sección B.
- 2 Este área representa la infusión de insulina. Líneas rosas sólidas representan infusión en modo manual y las sombras rosadas representan la administración de insulina basal del modo automático. Si administras un bolo, este será morado y se acompañará de información sobre carbohidratos e insulina.
- 3 La línea negra representa los valores del sensor y los círculos, los valores de glucosa en sangre introducidos. El círculo se coloreará de negro si la medición capilar se ha utilizado para calibrar el sistema. Consejo: recomendamos la calibración del sensor entre 3-4 veces al día.
- 4 Este informe también muestra tus eventos, tales como cambio del set de infusión o periodos de ejercicio.

NOTAS