

GUÍA DE INSTALACIÓN

NUEVO Sistema de subida de datos CareLink™ Personal

Actualiza tu CareLink para una comunicación más sencilla con tu médico

MEJORA LAS CONSULTAS CON TU EQUIPO MÉDICO ACTUALIZANDO TU CARELINK™



Entiende mejor tus niveles de glucosa




Actualiza los datos regularmente



Colabora con tu médico

LO PRIMERO ES DESCARGAR LOS ARCHIVOS PARA INSTALAR LA ACTUALIZACIÓN


Solo tienes que descargarlo una vez en cada ordenador desde el que quieras subir tus datos.

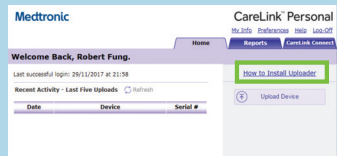

- 1
 - Inicia sesión
 - Pincha en "Cómo instalar la aplicación de carga"




- 2 Pincha en el link de descarga de programa

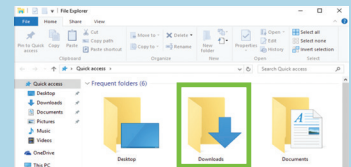


- 3 Busca la carpeta que se ha descargado


DESPUÉS DE LA DESCARGA, INSTALA LA ACTUALIZACIÓN

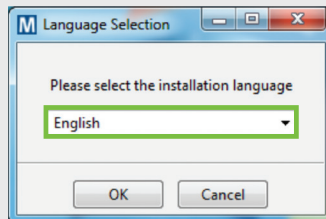


- 1 Elige tu idioma

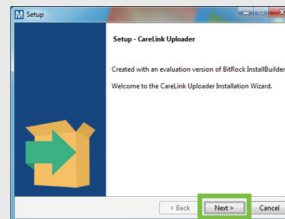

- 2 Pincha en siguiente

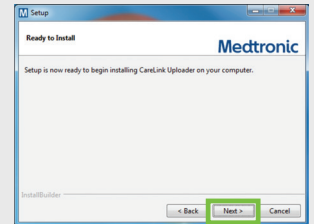

- 3 Pincha en siguiente

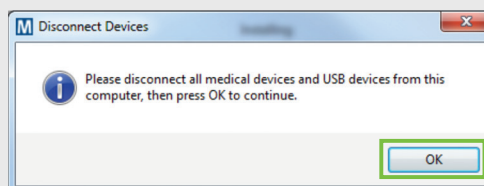

- 4
 - Asegúrate de que todos tus dispositivos médicos y de USB están desconectados del ordenador y después pulsa Aceptar
 - Pincha en Finalizar para terminar la instalación

AHORA YA ESTÁS LISTO PARA SUBIR DATOS

Vuelve a la página principal de tu CareLink™ Personal para subir los datos de tu bomba o glucómetro.

A la vuelta encontraras una guía sobre cómo subir tus datos.




Medtronic

GUÍA DE SUBIDA DE DATOS

Nuevo sistema de subida de datos CareLink™ Personal
El primer paso para comprender mejor tu diabetes.

LOS CUATRO PASOS PARA AÑADIR UNA NUEVA BOMBA O GLUCÓMETRO

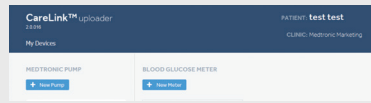


1 Elige la bomba o glucómetro


Bomba



2 Selecciona el modelo de bomba

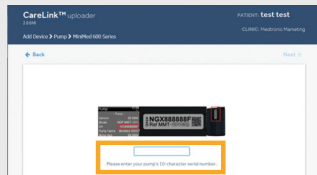


3 Introduce el número de serie de la bomba

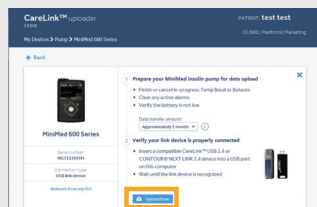


4

- Asegúrate de que la bomba está lista
- Pincha en "Añadir bomba"

Medidor

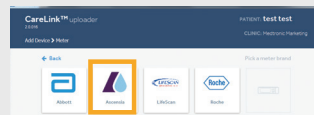

2 Selecciona la marca del glucómetro si solo quieres subir los datos de medición capilar

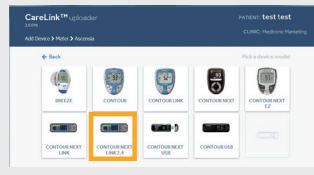

3 Selecciona el modelo de glucómetro



4

- Asegúrate de que el glucómetro está listo
- Pincha en "Añadir glucómetro"

TEN TODO LISTO PARA ASEGURAR UNA CORRECTA CARGA DE DATOS

Conecta tu USB o glucómetro en el ordenador

- Una vez conectado el USB de CareLink™ o el glucómetro, coloca la bomba lo más cerca posible de este
- Matén el glucómetro conectado con la bomba




Asegúrate de que la bomba está lista para subir datos
Comprueba que la bomba no está en ninguna de estas pantallas



- No basal temp
- No alarmas
- No bolus activo
- No batería baja


DOS SENCILLOS PASOS PARA SUBIR LOS DATOS DE TU BOMBA O GLUCÓMETRO

PASO 1

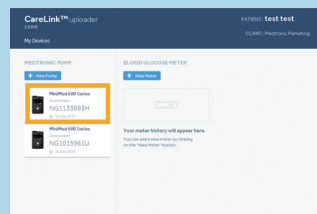

Selecciona el dispositivo

PASO 2

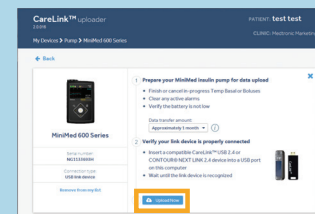

- Asegúrate de que el dispositivo está listo para subir datos
- Pincha en "Cargar ahora"

Información de seguridad:

Software CareLink™ El software CareLink™ está diseñado para utilizarse como una herramienta complementaria para ayudar en el control de la diabetes, y NO para basarse únicamente en ella.

Medtronic Ibérica S.A.
Calle María de Portugal, nº 11
ES-28050 Madrid
Tel.: 900 120 330

VINCULOLO CON TU MÉDICO



Conéctalo con el CareLink™ de tu médico para compartir los datos de forma más eficiente

© 2018 Medtronic. Todos los derechos reservados. El logo de Medtronic y Further, Together son marca registrada de Medtronic. Todos los nombres son marca registrada de Medtronic. UC201812041 ES