


GUÍA DE INSTALACIÓN

Nuevo Sistema de subida de datos CareLink™ Personal

Actualiza tu CareLink para una comunicación más sencilla con tu médico

OPTIMIZA LAS VISITAS DESCARGANDO EN CARELINK™ PERSONAL

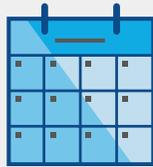

Descarga regularmente.



Aprende sobre tus patrones.



Colabora con tu equipo médico.

COMIENZA DESCARGANDO EL NUEVO UPLOADER

Una única descarga en el equipo en el que deseas descargar tu dispositivo.



- 1 Inicia sesión en CareLink™
 - Clica sobre "Cómo instalar el Uploader" o clica sobre "?" y a continuación sobre "Cómo instalar el Uploader".




- 2 Clica sobre el link de descarga y selecciona la ubicación en la que guardar el archivo del Uploader.




- 3 Busca el archivo descargado. Ábrelo y selecciona "Ejecutar".

TRAS LA DESCARGA, INSTALA EL UPLOADER

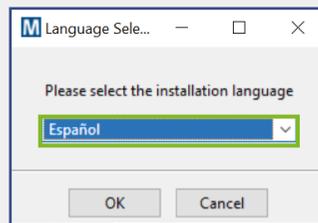


- 1 Selecciona tu idioma.

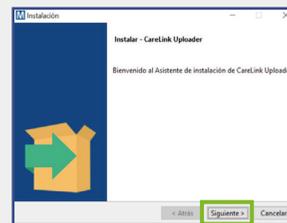

- 2 Clica en "Siguiente".



- 3 Clica en "Siguiente".

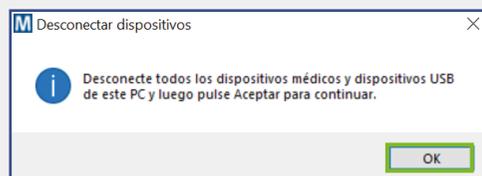

- 4 Asegúrate de que tu USB de descarga o medidor no están conectados y clica sobre "Ok".
 - Clica "Finalizar" para completar la instalación.



AHORA ESTÁS LISTO PARA SUBIR DATOS.

Vuelve a la página principal de tu CareLink™ Personal para subir los datos de tu bomba o glucómetro.

IMPORTANTE: consulte el prospecto de envase para ver todas las instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Productos sanitarios con marcado CE conformes al Real Decreto 1591/2009.

A la vuelta encontrarás una guía sobre cómo subir tus datos.

Medtronic

España
Medtronic Ibérica S.A.
Oficina Madrid
Calle María de Portugal, 11
28050, Madrid
Tlf. (+34) 91 625 04 00
Fax. (+34) 91 650 74 10

UC202108603 ES © 2020 Medtronic. Todos los derechos reservados. El logo de Medtronic y Further, Together son marca registrada de Medtronic. Todos los nombres son marca registrada de Medtronic.